

MARTCARE® 2021 MASQUES JETABLES FFP2 MOULÉ AVEC VALVE

CODE DE PRODUIT: BEH120-001-A00

LE FFP2V EST UN MASQUE DE CONCEPTION TRADITIONNELLE AVEC VALVE POUR LES POUSSIÈRES FINES, LES FIBRES ET LES BROUILLARDS NON TOXIQUES

 **paredes**

663200

GAMME MARTCARE®

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Le masque doit être porté conformément aux instructions fournies

Veiller à ce que le type de masque adapté soit sélectionné pour le travail à effectuer

En cas de doute sur le type de masque requis consulter un professionnel

MATÉRIAUX

Fibres synthétiques avec barrette nasale en aluminium et sangles en caoutchouc. Soupape d'expiration en polystyrène avec diaphragme en caoutchouc.

PERFORMANCE

Offre un facteur de protection assigné (FPA) de 10 x la valeur limite d'exposition (VLE) pour les poussières très fines non-toxiques, fibres, fumées et brouillards

DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE EXTÉRIEUR

Quantité: 100 (10 x boîtes de 10)

Hauteur: 2115mm

Largeur: 272mm

Longueur: 660mm

Poids: 2.75 Kg (env.)

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Nettoyage : Non Applicable - produit jetable

Stocker les masques à l'abri de la lumière directe du soleil, à l'écart de produits chimiques et dans une atmosphère sèche



DIMENSIONS DU MASQUE

Hauteur: 131mm

Largeur: 65mm

Longueur: 210mm

Poids: 23g (env.)

LIMITES D'UTILISATION

La protection ne sera assurée que si le masque est correctement porté

Le masque, en contact avec la peau peut provoquer des réactions allergiques chez des personnes sensibles

Si cela se produit, quittez la zone à risque, retirez le masque et consultez un médecin

Utiliser uniquement dans des zones bien ventilées non déficientes en oxygène et ne contiennent pas de matières explosives

Le masque doit être jeté et remplacé s'il est:

- enlevé dans la zone contaminée,
- des difficultés respiratoires dues au colmatage sont ressenties
- le masque est endommagé

Ce masque n'est pas conçu pour être porté par les personnes avec un pilosité au niveau du visage ce qui peut affecter l'étanchéité

CONFORMITÉ

Répond aux exigences FFP2 de EN149:2001+A1:2009

Numéro de certificat CE 73728, délivré par l'institut BSI Product Certification

AVERTISSEMENT: Les informations techniques sur ce document ont été validées le jour de son édition. Certaines données peuvent être modifiées sans notice préalable dans le processus d'amélioration et développement du produit. Si besoin de confirmer un détail technique merci de contacter le service QA : technical@jssafety.com.



MANUFACTURING FOR SAFETY
WWW.JSSAFETY.COM

FRANCE@JSSAFETY.FR
+ 33 (0) 4 78 01 76 10



Issued 13/03/2020 - 4