

Nettoyage et désinfection de la sonde ultrason VitaScan

Nettoyage quotidien:

- Nettoyer le VitaScan LT avec un tissu doux imprégné d'une solution détergente.
- Sécher précautionneusement le VitaScan LT avec un tissu doux et propre.
- Humidifier un tissu doux avec une solution à 70% d'éthanol. Essuyer la sonde avec le tissu doux humidifié.
- Laisser l'éthanol s'évaporer.



Désinfection

- Si le VitaScan LT doit être désinfecté, tremper un tissu doux dans une solution hospitalière à base de glutaraldéhyde.
- Essuyer l'instrument avec le tissu imbibé de cette solution.
- Enlever toute trace de la solution désinfectante à l'aide d'un tissu doux imbibé d'eau stérile ou d'une solution nettoyante.
- Sécher précautionneusement le VitaScan LT avec un tissu doux et propre avant d'utiliser la sonde.



⚠ Attention ! NE PAS:

- Ne pas soumettre quelque partie du VitaScan que ce soit à la stérilisation par vapeur ou à l'oxyde d'éthylène.
- Ne pas immerger l'instrument dans de l'eau ou une solution désinfectante.
- Ne pas utiliser de CidexPlus® pour désinfecter l'instrument. Le CidexPlus® endommagerait l'enveloppe en plastique.



Rappel ! Inspections hebdomadaires: Une fois par semaine, le dôme de la sonde doit être examiné pour rechercher d'éventuels défauts physiques ou fêlures. Une fêlure qui engendrerait la fuite ou l'intrusion de liquide pourrait affecter les performances de l'instrument. Tout dysfonctionnement ou fêlure apparent doit être signalé à notre centre de service autorisé ou à votre distributeur.

Note: Ces instructions concernent la sonde utilisée dans les deux systèmes proposés par Vitacon que sont le VitaScan LT et le VitaScan Portable.