

# SAC DE RECUEIL DES EXCRETA (VOMISSEMENTS, URINES, SELLE)

## UTILISATION SAC PROTÈGE-BASSIN, PROTÈGE SEAU ET PROTÈGE WC

1. Ouvrir la boîte, détacher du rouleau le 1<sup>er</sup> sac.
2. Placer le sac sur le support prévu à cet effet (protège bassin, seau, cuvette wc).
3. Le sac doit être ouvert complètement dans la longueur et la largeur et doit recouvrir intégralement le support ; le tampon doit être au fond du sac.
4. Utiliser le support selon le protocole en vigueur.
5. Après usage, retirer le sac plein, tirer sur les lien et nouer. Si nécessaire, renouer le sac sur lui-même. Ne pas jeter aux toilettes. Jeter dans les déchets ménagers, ou selon le protocole en vigueur.



Pour le protège WC,  
ne pas tirer la chasse d'eau  
lorsque le sac est encore  
sur le WC


**REALME**  
matériel médical  
Tel 03 22 72 55 24  
Fax 03 22 72 17 35  
contact@realme.fr  
1 rue des violettes 80 480 SALEUX

# SAC DE RECUEIL DES EXCRETA

## UTILISATION SAC VOMITOIRE ET URINAL

1. Ouvrir la boîte, détacher du rouleau le 1<sup>er</sup> sac.  
Le tenir par le rabat hygiénique protégé-mains et l'ouvrir.
2. Le tampon est au fond du sac, qui est prêt à l'usage.
3. Après usage, retirer le sac plein, tirer sur les lien et nouer.  
Si nécessaire, renouer le sac sur lui-même. Ne pas jeter aux toilettes.  
Jeter dans les déchets ménagers, ou selon le protocole en vigueur.

PORTER  
LES ÉQUIPEMENTS  
DE PROTECTION  
APPROPRIÉS

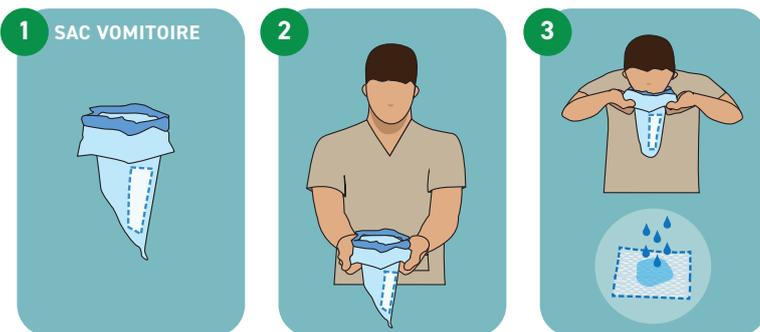

## POUR TOUS LES SACS

Le tampon enveloppé garantit qu'il n'y a pas de dispersion de micro-cellulose ou de poudre dans le sac ou sur la peau. Le sac et le tampon sont testés dermatologiquement et hypoallergéniques, pour permettre un contact prolongé et/ ou fréquent avec toutes les peaux (même les plus sensibles ou fragiles).

**REALME**  
matériel médical  
Tel 03 22 72 55 24  
Fax 03 22 72 17 35  
contact@realme.fr  
1 rue des violettes 80 480 SALEUX