


CHARIOT DE COURSE BALADEO

REFERENCE 828009



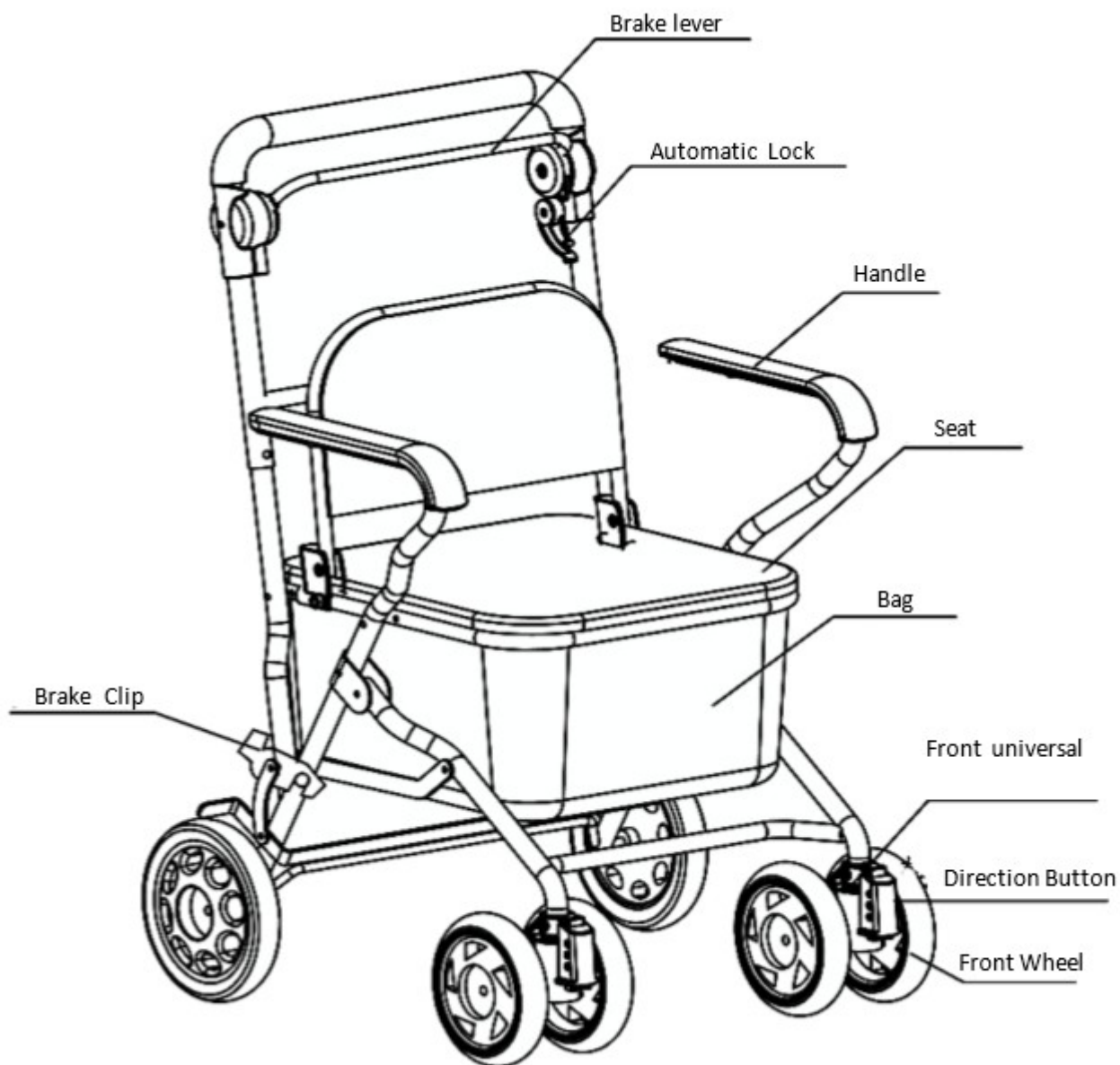

LEXIQUE

Brake Lever - LEVIER DE FREIN

Automatic Lock - VERROUILLAGE AUTOMATIQUE

Handle - POIGNÉE

Seat - SIEGE

Bag - SAC

Front Universal - AVANT UNIVERSEL

Direction Button - TOUCHE DIRECTIONNELLE


Front Wheel - ROUE AVANT

Brake Clip - BRAKE CLIP

1. MISE EN PLACE

Sortez le chariot de la boîte et ouvrez-le. Bien qu'il soit muni d'un verrouillage automatique, veuillez l'inspecter attentivement pour vous assurer qu'il est bien verrouillé.

Remarque : Si le verrouillage automatique n'est pas complètement verrouillé, le panier se déplacera automatiquement d'avant en arrière, veuillez ne pas l'utiliser à ce moment.

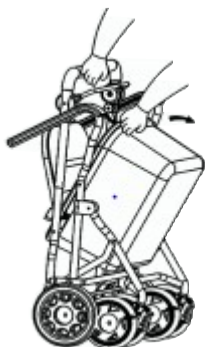

- retirer d'abord le bouton de pliage
- appuyez sur le siège et assurez-vous qu'il est à plat




Conseil de sécurité : lorsque vous êtes assis, placez le poids au milieu du siège et appuyez sur le bouton de stationnement pour arrêter le chariot de bouger.

2. POUR UTILISER LE FREIN


1. Lorsque le levier de frein est en position haute, le chariot est verrouillé (assurez-vous que le chariot est verrouillé en position assise).

2. Lorsque le levier de frein est en position basse, le chariot se déplace librement avec l'utilisateur ; tirez le levier vers le haut à la main permet d'engager temporairement le frein.

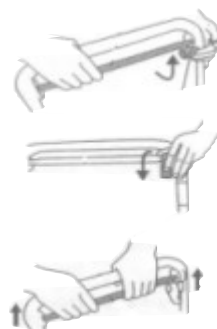

3. INSTALLATION DE LA POIGNÉE ET RÉGLAGE EN HAUTEUR


Ouvrez la trame principale du chariot, remontez la poignée, fixez le bouton et assurez-vous que la poignée et le cadre sont verrouillés.

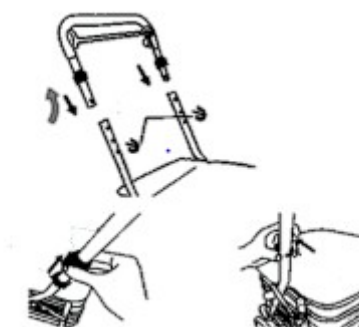

4. INSTALLATION ET MONTAGE DES ROUES

A. Ouvrir le châssis principal du chariot, mettre la roue avant (droite et soulever) dans le châssis principal. Si vous voulez enlever les roues avant, utilisez un outil (pince) et tirez-le vers le bas.

B. Le bouton de direction de la roue avant a trois positions : placez le bouton au point le plus haut, le chariot ira droit ; placez au milieu, le chariot peut être tourné de 45 degrés ; et au point le plus bas, le chariot peut tourner de 360° degrés.

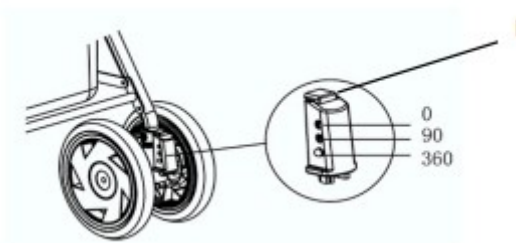


5. AJUSTEMENT MANUEL

Si le frein ne fonctionne pas.

A. Réglez le chariot en position de mouvement libre.

B. Dévissez le bouton de réglage et l'écrou de fixation à la main. Tournez le bouton de réglage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour déterminer si le niveau de freinage a été activé. Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour serrer.

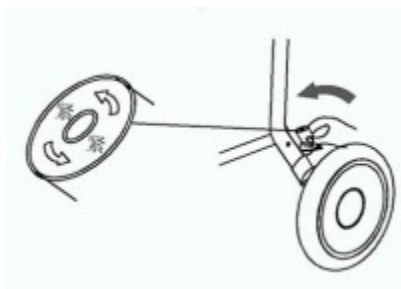

6. PLIER LE CHARIOT

Tirez d'abord le siège vers le haut, rabattez le cadre principal, vissez le bouton à main (droite et gauche), puis tirez la poignée vers le bas.



INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Vérifiez périodiquement que toutes les pièces sont en bon état de fonctionnement, les remplacer si nécessaire.

CONSEILS D'ENTRETIEN

Nettoyez avec un nettoyant doux et de l'eau ; séchez soigneusement.

For Safety



Maximum
User Wt:

