

GAMME MATELAS À AIR MOTORISÉS



NOUVEAU P100™

SYSTÈME THÉRAPEUTIQUE BASSE PRESSION CONTINUE DYNAMIQUE ALTERNÉE

INDICATIONS

Prévention :
Risque Faible à Moyen



Aide au traitement : selon stade(s), avec adjonction de systèmes de décharge et/ou de positionnement (cf. pages 54, 55).


CARACTÉRISTIQUES



Lavage housse :



NOUVEAU SYSTÈME P100™

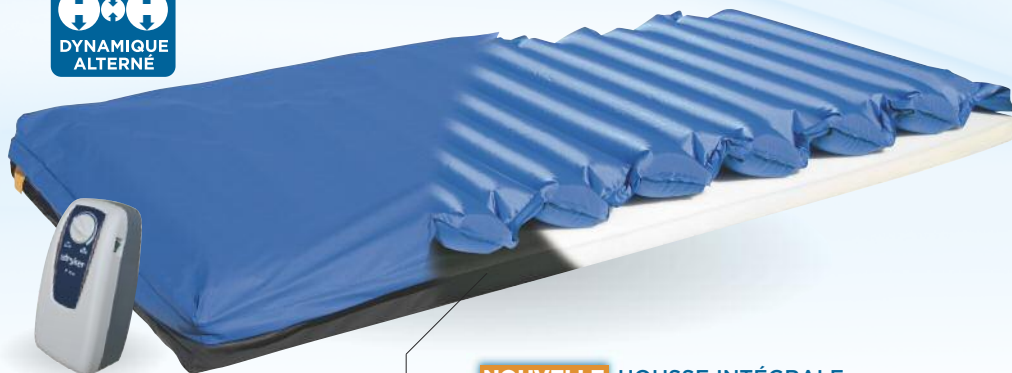

DEUX COMPARTIMENTS

- ↘ Housse dotée de 2 compartiments permettant de déhousser de manière indépendante le surmatelas ou la mousse support.



ANTI-DÉRAPANT

- ↘ Base anti-dérapante pour un meilleur maintien du support sur le lit.
- ↘ Compartiment inférieur également anti-glisse pour une meilleure stabilité du surmatelas à l'intérieur du support.



EXISTE EN VERSION HOUSSE INTÉGRALE TECHNOLOGIE ARGENT

- ↘ Technologie Argent Ag²⁺ : anti-bactérien (y compris MRSA) et anti-microbien.
- ↘ Bi-extensible, hyper-respirante afin de diminuer l'effet de macération et imperméabilisée.

NOUVELLE HOUSSE INTÉGRALE

- ↘ Enduction de Polyuréthane anallergique sur jersey polyester traité antibactérien, antimicrobien et antifongique.
- ↘ Bi-extensible, hyper-respirante afin de diminuer l'effet de macération et imperméabilisée.
- ↘ Fermetures éclair protégées d'un rabat pour une meilleure étanchéité du support.



ANTIBACTÉRIEN ANTIMICROBIEN ANTIFONGIQUE






FIXATION INTERNE DU SURMATELAS (4 points)

- ↘ Munie de 4 boutons de pression pour fixation et maintien du surmatelas en position dans la housse

INSTALLATION FACILITÉE

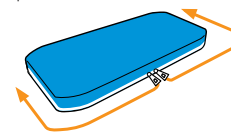- ↘ Ouverture sur 3 côtés des 2 compartiments (Housse argent : 4 côtés du compartiment supérieur (double curseur, séparable).



Référence	Modèle	 	Dimensions matelas
P1000001	Surmatelas à air Nouveau P100™ avec sa housse Intégrale P.U. + unité de contrôle + sous matelas mousse		90 x 200 x 18 cm
P1000002	Surmatelas à air Nouveau P100™ avec sa housse Technologie Argent + unité de contrôle + sous matelas mousse		90 x 200 x 18 cm
M1000002	Surmatelas à air Nouveau P100™ seul		90 x 200 x 13 cm
8POH15PU	Housse Intégrale P.U.		
8POHAGE	Housse intégrale Technologie Argent		
8PM004NU	Support Mousse		196 x 90 x 5 cm
8PM004PVC	Support Mousse avec sa housse P.U. (pour ancienne version de housse mono-compartiment)		196 x 90 x 5 cm
C102	Unité de contrôle pour Nouveau P100™		
8PGU0001	Gonfleur rapide universel		
8PASG002	Sac de transport		

Surmatelas
GARANTIE 1 AN

Unité de contrôle
GARANTIE 1 AN




NOUVEAU SYSTÈME P100™


BASSE PRESSION CONTINUE (BPC)

- ↳ Technologie visant à favoriser l'immersion « naturelle » du patient afin de maximiser la surface de portance et ainsi de répartir de façon plus harmonieuse les pressions d'interface sur l'ensemble de la surface corporelle, ce qui permet par là même de réduire les pressions exercées en regard des zones à risque d'escarre
- ↳ Efficacité reconnue, en préventif comme en curatif
- ↳ Pas de poids minimum
- ↳ Poids maximum : 120 kg
- ↳ Système auto-régulé, sécurité de traitement

BASSE PRESSION CONTINUE ALTERNÉE

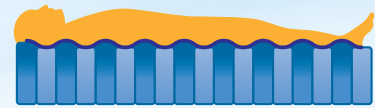

- ↳ Immersion du patient et optimisation des points de portance.
- ↳ Pressions constatées : 9 à 32 mmHg.
- ↳ Pas de poids minimum.

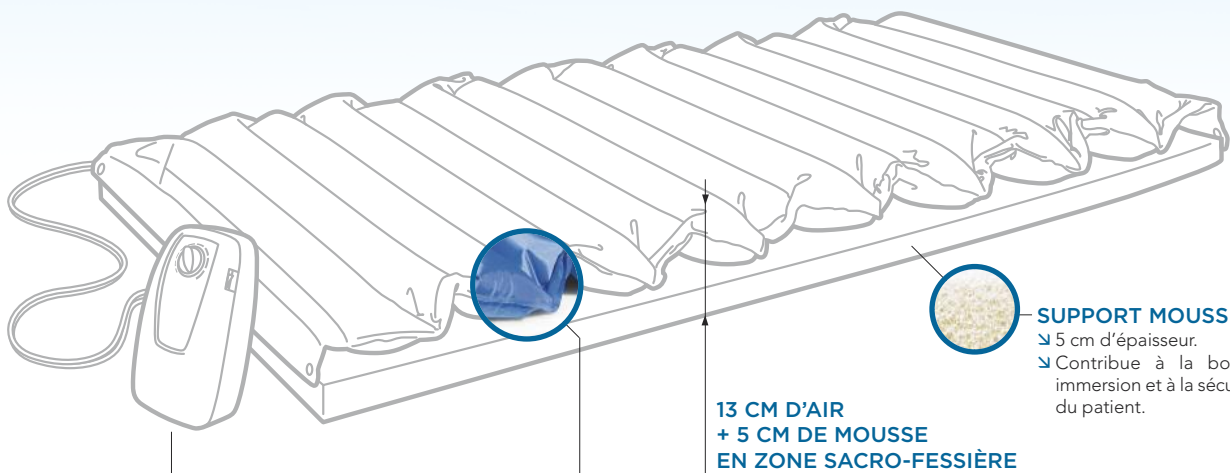

13 CM D'AIR
+ 5 CM DE MOUSSE
EN ZONE SACRO-FESSIÈRE

SUPPORT MOUSSE

- ↳ 5 cm d'épaisseur.
- ↳ Contribue à la bonne immersion et à la sécurité du patient.

NOUVELLE UNITÉ DE CONTRÔLE


- ↳ Prévention et traitement assurés en Basse Pression Continue dynamique alternée (micro-alternance).
- ↳ Pas de poids minimum recommandé.
- ↳ En mode dynamique, « micro-alternance » des points d'appuis au travers des cycles toutes les 6 minutes
- ↳ Gonflage possible avec le patient allongé.
- ↳ Réglage de confort disponible sans altérer le principe de Basse Pression Continue. Position « max » adaptée pour faciliter les soins, la toilette, et les transferts.
- ↳ Facilité d'utilisation : aucun risque de surgonflage.
- ↳ Sécurité : présence d'une alarme visuelle.

NOUVEAU SURMATELAS

- ↳ Le surmatelas est composé de 15 cellules anatomiques permettant une répartition optimale de la pression.
- ↳ Matériau souple et résistant (nylon enduit), conception longue durée.
- ↳ Ergonomie multizones (brevet n° 5787531) : adaptation à toutes les morphologies et optimisation des points de portance quelle que soit la position du patient (allongé ou buste relevé...).
- ↳ Désinfection simple et rapide du support grâce à un système qui se démonte très facilement et entièrement.



POSITION :
MIN → 1/2
Prévention escarre,
traitement

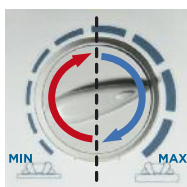


POSITION :
1/2 → MAX
Soins, nursing,
transfert, activation
du relève buste



SAC DE TRANSPORT
DISPONIBLE

ERGONOMIE (Brevet N° 5787531) :

- ↳ Adaptée automatiquement à la morphologie du patient.

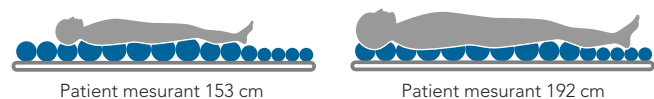

OPTIMISATION DES POINTS DE PORTANCE

