





GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE **Fr**

Unité de base

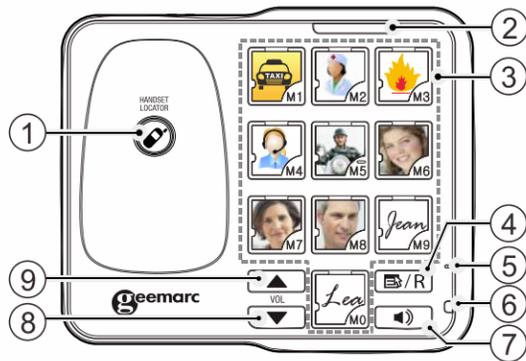


Combiné

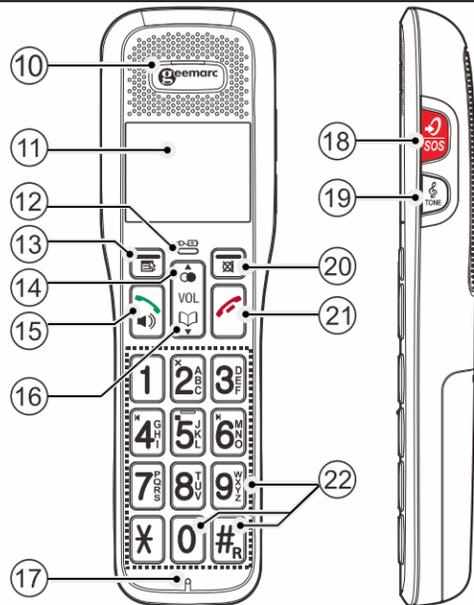

1

Base de connexion

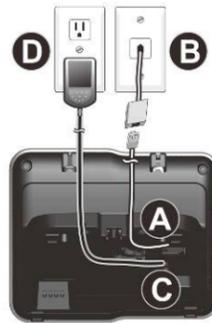

Vérifiez si une version plus récente de ce guide de démarrage rapide est disponible sur notre site Internet: www.geemarc.com

CONTENU DU COLIS

1 unité de base téléphonique, 1 combiné sans fil, 1 adaptateur secteur, 1 cordon téléphonique, 3 batteries NiMh, 1 guide de démarrage rapide.

INSTALLATION

Branchement du téléphone

Branchez le câble téléphonique dans la prise téléphonique (A) et dans la prise murale téléphonique (B).

Branchez le jack de l'adaptateur secteur dans l'unité de base (C) puis branchez la fiche de l'adaptateur secteur sur le secteur (D).

Remarque : utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni avec le téléphone.

Branchement de la batterie

Faites glisser le couvercle des batteries vers le bas.

Installez les 3 batteries dans le compartiment, tel qu'indiqué, en respectant la polarité (+, -)

Alignez le couvercle à plat contre le compartiment des batteries, puis faites-le glisser vers le haut jusqu'à ce qu'il s'enclenche dans la bonne position.

Chargement des batteries

Chargez les batteries pendant au moins 16 heures avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Unité de base

1. LOCALISATEUR DU COMBINÉ

Lorsque le téléphone est en veille, appuyez sur la touche pour faire sonner le ou tous les combinés.

2. EN LIGNE

ACTIVÉ lorsque l'on utilise les combinés ou l'unité de base ou lorsque le système répond à un appel entrant.

ACTIVÉ lorsqu'un combiné est en cours d'enregistrement.

Clignote en cas d'appel entrant ou en mode localisation des combinés.

3. TOUCHES PHOTOS

10 grandes touches mémoire photos ou de composition pour appeler à partir de la base.

4. FLASH / PROG

En ligne Appuyez sur la touche pour faire un flash

En mode Veille Appuyez sur cette touche pour programmer les touches de mémoire photos.

5. MICRO

6. INDICATEUR DU MODE HAUT-PARLEUR

ACTIVÉ lorsque le haut-parleur est allumé.

7. TOUCHE MAINS LIBRES

REMARQUE: patientez 2 secondes avant de composer le numéro de téléphone avec les touches photos.

8. VOL

En mode Haut-parleur : appuyez sur la touche pour diminuer le volume du haut-parleur.

En mode Veille : appuyez sur la touche pour diminuer le volume de la sonnerie de l'unité de base.

9. VOL

En mode Haut-parleur : appuyez sur la touche pour augmenter le volume du haut-parleur.

En mode Veille : appuyez sur la touche pour augmenter le volume de la sonnerie de l'unité de base.

Combiné

10. ÉCOUTEUR

2

11. ÉCRAN LCD

12. VOYANT DE CHARGE

Constamment allumé lorsque le combiné est en cours de chargement dans son chargeur.

13. MENU/OK

En mode veille: appuyez sur la touche pour accéder au menu principal.
En mode de sous-menu: appuyez sur la touche pour confirmer la sélection.
Au cours d'un appel: appuyez sur la touche pour accéder à : transfert / au répertoire / à la liste de reconstitutions(BIS) / Journal.

14. VERS LE HAUT/LISTE DES RECOMPOSITIONS

En mode veille: appuyez sur la touche pour accéder à la liste des reconstitutions.

En mode Menu: appuyez sur la touche pour faire défiler les éléments du menu.

Dans le répertoire téléphonique/la liste des reconstitutions/la liste des appels: appuyez sur la touche pour faire défiler la liste vers le haut.

En mode modification: appuyez sur la touche pour déplacer le curseur d'un caractère vers la gauche.

Au cours d'un appel: appuyez sur la touche pour augmenter le volume d'écoute.

Lorsque le téléphone sonne: appuyez sur la touche pour augmenter le volume de la sonnerie.

15. CONVERSATION / MAINS LIBRES

En mode Veille/de pré numérotation: appuyez sur la touche pour passer un appel.

Dans le répertoire téléphonique/la liste des reconstitutions / la liste des appels: appuyez sur la touche pour téléphoner à la personne sélectionnée dans la liste.

Lorsque le téléphone sonne: appuyez sur la touche pour répondre à un appel.

En ligne: appuyez sur la touche pour passer en mode Mains libres. Appuyez sur la touche pour repasser en mode normal.

16. VERS LE BAS/RÉPERTOIRE TÉLÉPHONIQUE

En mode veille : appuyez sur la touche pour accéder au répertoire.

En mode Menu : appuyez sur la touche pour faire défiler les éléments du menu vers le bas.

Dans le répertoire téléphonique/la liste des reconstitutions/la liste des appels : appuyez sur la touche pour faire défiler la liste vers le bas.

En mode modification : appuyez sur la touche pour déplacer le curseur d'un caractère vers la droite.

Au cours d'un appel : appuyez sur la touche pour diminuer le volume d'écoute.

Lorsque le téléphone sonne : appuyez sur la touche pour diminuer le volume de la sonnerie.

17. MICRO

18. SOS AVEC AMPLIFICATION DU SON (SOS)

Au cours d'un appel : appuyez sur la touche pour activer / désactiver la fonction d'AMPLIFICATION DU SON

En mode veille: maintenez la touche enfoncée pendant 3 secondes pour démarrer la séquence d'appel d'urgence définie sur votre combiné.

En mode d'appel : maintenez la touche enfoncée pendant 2 secondes pour arrêter l'appel d'urgence.

19. TONALITÉ

Au cours d'un appel : appuyez sur cette touche pour modifier la tonalité (GRAVE, AIGU, NORMAL).

20. ANNULER/SECRET

En mode Menu principal: appuyez sur la touche pour revenir à l'écran de veille.

En mode de sous-menu: appuyez sur la touche pour retourner au menu précédent.

En mode modification/pré numérotation: appuyez sur la touche pour supprimer un caractère/ un chiffre.

En mode modification/pré numérotation: maintenez la touche enfoncée pour supprimer tous les caractères/chiffres.

Au cours d'un appel: appuyez sur la touche pour désactiver/réactiver le micro.

Lorsque le téléphone sonne: appuyez sur la touche pour désactiver la sonnerie du combiné.

En mode Veille: appuyez sur la touche pour appeler un autre combiné, la base ou tout par interphone.

21. SILENCE

Au cours d'un appel : appuyez sur la touche pour terminer un appel et revenir à l'écran de veille.

En mode Menu/ modification : appuyez sur la touche pour revenir à l'écran de veille.

3

22. PAVÉ ALPHANUMÉRIQUE, ÉTOILE (*), DIÈSE (#)

En mode de pré numérotation ou de modification: appuyez sur la touche pour insérer un chiffre ou un caractère /*/#.

#R au cours d'un appel : maintenez la touche enfoncée pour faire un flash.

0 Touche 0 en mode veille/de pré numérotation/modification d'un numéro : Maintenez la touche enfoncée pour insérer une pause.

PREMIÈRE UTILISATION DE VOTRE COMBINÉ

Une fois les batteries insérées, un message s'affiche à l'écran vous demandant de sélectionner la langue à l'aide des touches ▼/▲, appuyez sur **MENU/OK** pour confirmer.

Entrez, ensuite, la date à l'aide du pavé et confirmez en appuyant sur **MENU/OK**.

Entrez l'heure correcte à l'aide du pavé et confirmez en appuyant sur **MENU/OK**.

RÉGLAGES DU MENU

Les réglages du téléphone sont toujours définis de manière similaire:

Appuyez sur la touche **MENU/OK** pour ouvrir le menu principal. Puis, utilisez les touches ▼▲ pour sélectionner une entrée ; confirmez en appuyant sur la touche **MENU/OK**.

Combiné

JOURNAL DES APPELS

► AFFICHER LA LISTE sous une entrée : DÉTAILS ► AJOUTER REP ► AJOUTER BLOQ ► EFFACER ► SUPP TOUT

MÉM PHOTOS: M1 à M0

RÉPERTOIRE TÉLÉPHONIQUE

► TOUT ► MEM DIRECT ► VIP sous une entrée : ► AJOUTER ► VOIR ► EDITER ► EFFACER ► SUPP TOUT ► AJOUT VIP ► AJOUTER DIR ► STATUS

NUM BLOQUE

LISTE NOIRE -sous une entrée: ► AJOUTER ► VOIR ► EDITER ► EFFACER ► SUPP TOUT ► STATUS) RÉGLAGES (REGL BLOQ. ► SANS NUM)

TRANSFERT: ► COMBINÉ * ► BASE ► TOUT

RÉGL BASE

► SONN BASE ► VOL. SONN. ► TPS FLASH ► 1ère SONN

RÉGL COMBINE

► RÉGL SONNERIE ► RÉGL TONALITÉ ► LANGAGE ► DATE ET HEURE ► ASSOCIER ► PAR DÉFAUT

RÉGL SOS: NUMÉRO SOS ► MSG SOS ► LANGAGE (parlé)

REG ALARME

► M/A (ALARME 1 À 10) ► (UNE FOIS/QUOTIDIENNEMENT/ LUN-VEN/ SAM-DIM)

NUM VOCALE: ► MARCHÉ ► ARRÊT

RÉP SYS.

► LIRE MSG ► SUP TOUT ► MEMO ► REP M/A ► REG REP (LANGAGE(parlé) ► AFF ECRAN (FILTRAGE), MESSAGE, NB DE SONNERIE, TPS ENREGISTREMENT, ACCES DISTANT, MODIF PIN, ALERTE MSG)

ENREGISTREMENT DU COMBINÉ

Remarque : le combiné et la station de base ont été pré-enregistrés en usine. Il est possible d'enregistrer jusqu'à cinq combinés à une station de base.

Enregistrement d'un combiné

Sur la **Base**: maintenez enfoncée la touche **HANDBET LOCATOR**(1) jusqu'à ce que vous entendiez un bip et entrez en mode d'enregistrement.

Sur le **combiné** : appuyez sur **MENU/OK**. Utilisez les touches ▼▲ pour sélectionner **RÉGL COMB** et appuyez sur **MENU/OK**. Utilisez les touches ▼▲ pour sélectionner **ASSOCIER**, Appuyez sur **MENU/OK** et APPAIRAGE s'affiche.

Après un bref délai, si l'enregistrement a réussi, un bip de confirmation sera émis et l'écran du combiné repassera en mode veille, puis le numéro du nouveau combiné s'affichera. L'unité de base retournera également en mode Veille.

INTERPHONE

Appel interne

4

- 1) Appuyez sur **MENU/OK** , et sur les touches **▼/▲** pour sélectionner **TRANSFERT**, Appuyez sur **MENU/OK** .
- 2) Choisissez le numéro de combiné souhaité, **Base** ou **TOUT** et appuyez sur **MENU/OK** .

Si vous recevez un appel sur l'unité de base en mode main libre, celui-ci sera automatiquement transmis au combiné si ce dernier ne se trouve pas sur le chargeur.

Appel de tous les combinés

Comme indiqué dans la section 1 du chapitre sur les appels internes, choisissez **TOUT**.

Transfert d'un appel externe

Comme indiqué dans la section 1 du chapitre sur les appels internes, choisissez le numéro de combiné souhaité à l'aide des touches **HAUT/BAS**. Une fois la connexion établie, quittez l'appel sur le combiné en appuyant sur .

Conférence téléphonique

Comme indiqué dans la section 1 du chapitre sur les appels internes, choisissez le numéro de combiné souhaité à l'aide des touches **▼/▲**.

Une fois la connexion établie, maintenez la touche **X** enfoncée jusqu'à ce que le terme CONFÉRENCE s'affiche.

REMARQUE: la partie qui raccroche au cours d'une conférence téléphonique laissera l'autre partie en communication avec la partie externe.

RÉPERTOIRE TÉLÉPHONIQUE

Votre combiné peut stocker jusqu'à 50 entrées avec nom et numéros. Un maximum de 20 chiffres pour le numéro et de 10 caractères pour le nom peuvent être enregistrés pour chaque entrée du répertoire téléphonique. Les entrées du répertoire sont stockées alphabétiquement.

Pour ajouter une nouvelle entrée

En mode veille :

Appuyez sur **MENU/OK** , et sur **▼/▲** pour sélectionner **RÉPERTOIRE** et appuyez 2 fois sur **MENU/OK**  pour accéder à la liste du répertoire (ou vide)

Appuyez sur **MENU/OK**  pour sélectionner **AJOUTER**.

Appuyez sur **MENU/OK**  pour sélectionner **NUMÉRO** et entrez le numéro

Appuyez sur **MENU/OK**  pour sélectionner **NOM** et entrez le nom

Appuyez sur **MENU/OK**  pour enregistrer.

APPEL D'URGENCE SOS

Réglages SOS

Les numéros SOS doivent avoir été définis avant qu'il soit possible de passer un appel d'urgence.

Utilisation du combiné :

Appuyez sur **MENU/OK**  et sur **▲/▼** pour sélectionner **REGL SOS**.

Appuyez sur **MENU/OK**  et sur **▲/▼** pour sélectionner **NUM SOS**.

Appuyez sur **MENU/OK**  et sur **▲/▼** pour sélectionner le numéro SOS à modifier (**SOS 1**, **SOS 2**, **SOS 3** ou **SOS 4**).

Appuyez sur **MENU/OK**  et sélectionnez **AJOUTER** pour entrer un nouveau numéro ou sur **EDITER** pour modifier le numéro déjà enregistré.

Appuyez sur **MENU/OK**  et entrez un nouveau nom ou modifiez le nom déjà enregistré.

Appuyez sur **MENU/OK**  pour confirmer ou sur la touche de **FONCTION DROITE**  pour supprimer.

Passer des appels d'urgence

Sur le combiné, maintenez la touche **SOS** enfoncée pendant 3 secondes pour entrer dans la séquence d'appel d'urgence **SOS 1** à **SOS 4**. Un appel sera d'abord passé au numéro **SOS 1**. Si le numéro **SOS 1** ne répond pas dans les 60 secondes, un autre appel sera effectué au numéro **SOS 2**, etc.

Remarque : la personne recevant le message SOS doit appuyer sur n'importe quel numéro de son téléphone pour répondre à l'appel d'urgence. Ensuite, le fait d'appuyer sur un numéro du téléphone toutes les deux minutes permettra de maintenir l'appel d'urgence ouvert. Sinon le téléphone raccrochera l'appel après 10 secondes.

Enregistrement du message SOS

Vous pouvez enregistrer votre propre message d'urgence qui sera diffusé lorsque vous lancerez l'appel d'urgence. Sinon, le message par défaut sera lu.

Appuyez sur **MENU/OK**  et sur **▲/▼** pour sélectionner **REGL SOS**.

Appuyez sur **MENU/OK**  et sur **▲/▼** pour sélectionner **MSG SOS**.

Appuyez sur **MENU/OK**  et sur **▲/▼** pour sélectionner **ENREG**.

Appuyez sur **MENU/OK**  pour démarrer l'enregistrement du message SOS ; **'ENREG** s'affichera sur l'écran.

Appuyez sur **MENU/OK**  pour sauver votre message SOS.

Lecture du message SOS

Appuyez sur **MENU/OK**  et sur **▲/▼** pour sélectionner **REGL SOS**.

Appuyez sur **MENU/OK**  et sur **▲/▼** pour sélectionner **MSG SOS**.

Appuyez sur **MENU/OK**  pour afficher **ECOUTER**.

Appuyez sur **MENU/OK**  pour lire le message d'urgence.

Appuyez sur la touche **5** pour arrêter la lecture du message SOS.

DÉFINIR LES TOUCHES DE COMPOSITION ABRÉGÉE SUR LE COMBINÉ

Appuyez sur **MENU/OK**  et sur **▲/▼** pour sélectionner **RÉPERTOIRE**.

Appuyez sur **MENU/OK**  et sur **▲/▼** pour sélectionner **MEM DIRECT**.

Appuyez sur **MENU/OK**  , utilisez **▲/▼** pour sélectionner la touche de composition abrégée.

Appuyez sur **MENU/OK**  , sélectionnez **AJOUTER** ou **MODIFIER**.

Appuyez sur **MENU/OK**  et entrez le numéro de téléphone.

Appuyez sur **MENU/OK**  pour entrer le NOM.

Appuyez sur **MENU/OK**  pour confirmer.

En mode Veille, maintenez enfoncée une des touches 1 à 9 pendant 3 secondes pour pouvoir utiliser la touche de composition abrégée (vous entendrez un bip de confirmation).

TOUCHES MÉMOIRE PHOTOS

Sur la base

Vous avez la possibilité de stocker 10 mémoires photos. **En mode Veille** Appuyez sur , entrez le numéro de téléphone à l'aide des touches M0 à M9 de la base. Appuyez sur  puis sur la touche de mémoire photo que vous avez choisie.

Utilisation du combiné:

- 1) Appuyez sur **MENU/OK** , et sur **▼▲** pour choisir **MEM PHOTO**.
- 2) Appuyez sur **MENU/OK** , et sur **▼▲** pour choisir **M1** à **M0**.
- 3) Appuyez sur **MENU/OK** , sélectionnez **AJOUTER** ou **MODIFIER**.
- 4) Appuyez sur **MENU/OK** , entrez le numéro.
- 5) Appuyez sur **MENU/OK** , entrez le nom, puis appuyez sur **MENU/OK** , pour enregistrer.

Vous avez la possibilité d'enregistrer un nom vocal en choisissant **NOM VOCAL** et **ENREG** dans la section 3.

Si vous recevez un appel dont le numéro a été enregistré avec un nom vocal, celui-ci sera diffusé sur la base et sur le combiné.

REMARQUE : pour utiliser une des grandes touches de mémoire photo en mode Veille, appuyez sur la touche photo et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que le voyant s'allume sur la base.

Si vous souhaitez transférer l'appel au combiné depuis la base, sortez le combiné de l'unité de base pour prendre l'appel.

Si le combiné n'est pas placé sur l'unité de base, appuyez sur  pour prendre l'appel et appuyez sur  sur la base pour raccrocher l'appel.

RÉPONDEUR TÉLÉPHONIQUE

Votre base inclut un répondeur téléphonique qui enregistre les appels non répondus lorsqu'il est activé. Le répondeur peut stocker jusqu'à 59 messages dans la période d'enregistrement maximale d'environ 30 minutes. En outre d'enregistrer les messages entrant, vous pouvez enregistrer des mémos pour les autres utilisateurs du téléphone.

Activation / désactivation du répondeur

Utilisation du combiné:

1. Appuyez sur **MENU/OK**  et sur les touches **▼/▲** pour sélectionner **RÉPONDEUR**
2. Appuyez sur **MENU/OK**  et sur **▼/▲** pour sélectionner **REP M/A**.
3. Appuyez sur **MENU/OK**  et sur **▼/▲** pour sélectionner **MARCHE** ou **ARRET**.
4. Appuyez sur **MENU/OK**  pour confirmer.

Lecture des messages sur le répondeur
Si vous avez reçu 2 nouveaux messages par ex, l'écran affichera 2 NOUVEAU MESSAGE. Les nouveaux messages sont lus en premier puis sont enregistrés comme anciens messages et restent tel quel jusqu'à ce qu'ils soient supprimés. Les anciens messages sont relus une fois que tous les nouveaux messages ont été complètement diffusés.

Utilisation du combiné:

- 1) Appuyez sur **MENU/OK**  puis sur **▼/▲** pour sélectionner **REPONDEUR**.
- 2) Appuyez sur **MENU/OK**  pour afficher **LIRE MSG**.
- 3) Appuyez sur **MENU/OK**  une nouvelle fois pour démarrer la lecture ; l'écran affiche la date et l'heure du message reçu.

- 4) Au cours de la lecture du message, appuyez respectivement sur les touches **▼/▲** pour diminuer ou augmenter le volume de lecture. **REMARQUE** : une fois la lecture du nouveau message terminée, il sera enregistré en tant qu'ancien message à moins qu'il ne soit supprimé.
- 5) Appuyez sur **MENU/OK**  et sur **▼/▲** pour sélectionner **ARRÊT**, **SUIVANT**, **PRÉCÉDENT** ou **EFFACER** pour exécuter les fonctions suivantes au cours de la lecture du message.
 - **ARRÊT** : Stop la lecture du message en cours et retourne dans le menu RÉPONDEUR.
 - **SUIVANT** : lit le message suivant. La date et l'heure du message suivant s'affichera.
 - **PRÉCÉDENT** : reprend la lecture du message en cours depuis le début. La date et l'heure du message en cours s'affiche.
 - **EFFACER** : supprime le message en cours et lit le message suivant.
- 6) Appuyez sur **MENU/OK**  pour confirmer le réglage.

Définir le délai de réponse
Vous pouvez régler le nombre de sonneries souhaitées avant que le répondeur commence à diffuser votre message enregistré. Vous pouvez programmer le répondeur de sorte à ce qu'il réponde à l'appel après plusieurs sonneries (entre deux et huit) ou définir la fonction ÉCONOMIE DE TEMPS (MODE ECO).

La fonction ÉCONOMIE DE TEMPS répond aux appels après 6 sonneries, jusqu'à ce que le premier message ait été enregistré. Puis elle répond après 2 sonneries. Cette fonction est utile si vous appelez de l'extérieur; En effet, si vous appelez le répondeur et qu'il n'y a pas eu de réponse après quatre sonneries, cela signifie qu'aucun message n'a été enregistré et que vous pouvez raccrocher avant que l'appel ne vous soit facturé.

Utilisation du combiné

- 1) Appuyez sur **MENU/OK**  puis sur **▼/▲** pour sélectionner **REPONDEUR**.
- 2) Appuyez sur **MENU/OK**  et sur **▼/▲** pour sélectionner **REGL REP**.
- 3) Appuyez sur **MENU/OK**  puis sur **▼/▲** pour sélectionner **NB SONNERIE** (Options disponibles. **2 SONN**, **4 SONN**, **6 SONN**, **8 SONN**, **10 SONN** ou **MODE ECO (TOLL SAVE)**).
- 4) Appuyez sur **MENU/OK**  pour confirmer.

OPÉRATIONS À DISTANCE

Si vous n'êtes pas à la maison, vous pouvez appeler pour activer ou désactiver votre répondeur et écouter vos messages à distance à partir d'un autre téléphone.

- 1) Passez un appel depuis un téléphone.
- 2) Lorsque le répondeur répond à l'appel et commence à lire l'annonce appuyez sur **X**.
- 3) Entrez le code PIN d'accès à distance à 4 chiffres (le PIN par défaut est **0000**).
- 4) Appuyez sur les touches suivantes pour activer la fonction souhaitée.

Touche	Fonctions	
	Lorsque la lecture du message n'a pas été lancée	Lorsque la lecture du message a été lancée
2		Effacer le MSG en cours
4		Reprendre la lecture du MSG en cours depuis le début. Appuyez deux fois sur la touche pour revenir au message précédent.
5		Arrêter la lecture du MSG en cours
6		Pour lire le message suivant
7	Activer le répondeur	
9	Désactiver le répondeur	
*	Entrer le code PIN d'accès à distance à 4 chiffres	

REMARQUE: lorsque la mémoire de votre répondeur est pleine, l'appareil passe automatiquement en mode de RÉPONSE UNIQUEMENT. Il reviendra automatiquement en mode RÉP ET ENREGISTRER après la suppression de plusieurs messages.

Vous ne pourrez pas supprimer les nouveaux messages avant de les avoir écoutés.

Fonction ALARME

- Vous avez la possibilité de programmer 10 alarmes.
- 1) Appuyez sur **MENU/OK**  puis sur **▼/▲** pour sélectionner l'option **REG ALARME**.
 - 2) Appuyez sur **MENU/OK**  puis sur **▼/▲** pour sélectionner votre alarme.
 - 3) Appuyez sur **MENU/OK**  puis sur **M/A** pour sélectionner **MARCHE**.

- 4) Appuyez sur **MENU/OK**  et entrez l'heure.
- 5) Appuyez sur **MENU/OK**  et choisissez la fréquence.
- 6) Appuyez sur **MENU/OK**  pour enregistrer.

Fonction VOCALE

Vous avez la possibilité d'activer ou de désactiver la fonction VOCALE. **Activer**: cette fonction permet d'entendre le chiffre composé.

- 1) Appuyez sur **MENU/OK**  puis sur **▼/▲** pour sélectionner **NUM VOCALE**.
- 2) Appuyez sur **MENU/OK**  et sur **▼/▲** pour sélectionner **MARCHE** ou **ARRET**.
- 3) Appuyez sur **MENU/OK**  pour enregistrer.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Informations fondamentales	
Portée valide	À l'intérieur 50 m / À l'extérieur : 300 m
Durée de fonctionnement du combiné	Temps de disponibilité passive 100 heures Durée de conversation environ 10 heures
Paramètre RF	
Fréquence	1,88 GHz à 1,9GHz
Nombre de canaux	10
Alimentation électrique	
Unité de base	Sortie 100-240V 50/60Hz; Sortie 6V; adaptateur 600mA
Chargeur	Sortie 100-240V 50/60Hz; Sortie 6V; adaptateur 450mA
Combiné	3 batteries AAA 1,2V/600mAh rechargeables

ENTRETIEN

Nettoyez la surface du boîtier avec un chiffon doux et non pelucheux. N'utilisez pas de produits de nettoyage ou de solvants.

GARANTIE

Votre produit Geemarc est garanti pendant 2 ans, suivant la date d'achat. Au cours de cette période, toutes les réparations ou tous les remplacements (à notre seule discrétion) seront effectués sans frais. En cas de problème, contactez notre service d'assistance ou rendez-vous sur notre site Web : **www.geemarc.com**.

La garantie ne couvre pas les accidents, la négligence ou les ruptures de pièces. Le produit ne doit pas être altéré ou démonté par quiconque n'étant pas un représentant agréé de Geemarc.

La garantie de Geemarc ne limite en aucun cas vos droits légaux.

IMPORTANT : VOTRE FACTURE FAIT PARTIE DE VOTRE GARANTIE ET DOIT ÊTRE CONSERVÉE ET PRODUITE LORS D'UNE RÉCLAMATION SOUS GARANTIE.

Remarque : la garantie est applicable en France uniquement.

DÉCLARATIONS:

Directives CE
Geemarc Telecom SA déclare par la présente que ce produit est conforme aux exigences essentielles ainsi qu'à d'autres dispositions pertinentes de la Directive 2014/53/UE concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications. *La déclaration de conformité peut être consultée sur **www.geemarc.com***

Directives de recyclage
Le système DEEE (déchets des équipements électriques et électroniques) a été mis en œuvre pour les produits en fin de vie qui seront recyclés de la meilleure manière possible.

Lorsque ce produit ne fonctionne plus, ne le jetez pas avec vos déchets domestiques. Veuillez utiliser une des options suivantes:

- Retirez les piles et jetez-les dans une benne DEEE appropriée. Jetez le produit dans une benne DEEE appropriée.
- Ou rapportez-le à votre détaillant. Si vous achetez un nouvel article, l'ancien devrait être accepté.

Ainsi, en respectant ces instructions, vous contribuez à la santé publique et à la protection de l'environnement.



N'hésitez pas à consulter notre site Internet pour obtenir des informations et de l'aide sur nos produits : 2 rue Galilée, 59791 GRANDE-SYNTHÉ CEDEX, FRANCE
www.geemarc.com
Téléphone **0328587599** ou fax **0328587576**