



GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Unité de base


Fr

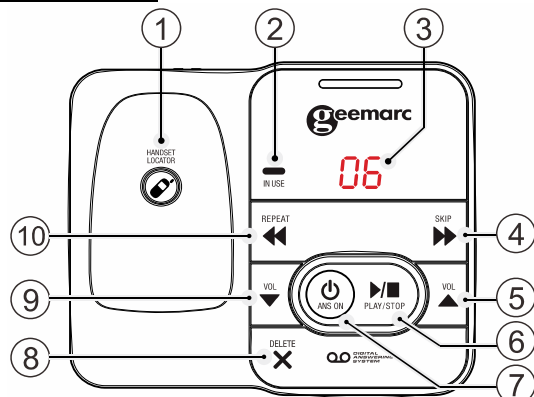

Combiné

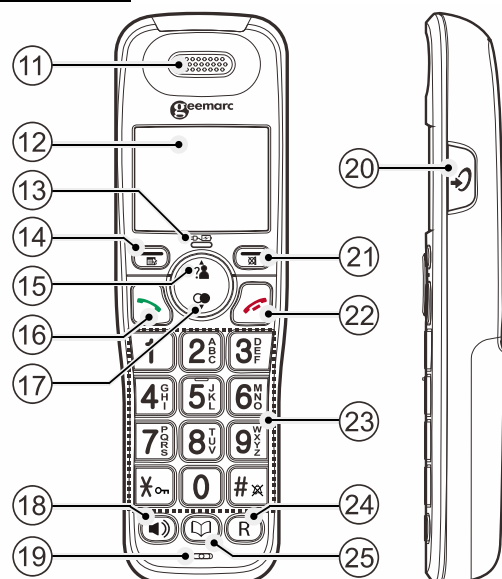

Branchement

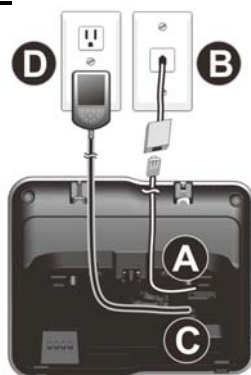

Branchement d'un combiné supplémentaire (Option)



Vous pouvez trouver sur notre site Geemarc.com la notice plus détaillée du produit

Nous vous remercions d'avoir acheté votre téléphone Geemarc AMPLIDECT DECT295. Ce téléphone offre tous les avantages de la technologie sans fil (conforme à la norme Digitally Enhanced Cordless Telecommunications-DECT), ainsi qu'un clavier comportant de grosses touches, idéal pour ceux qui souffrent de problèmes de vue. Ce téléphone est également compatible avec les appareils auditifs.

Il est important de lire les instructions ci-dessous afin de pouvoir exploiter tout le potentiel offert par le téléphone Geemarc. Conservez ce guide d'utilisation dans un endroit sûr pour toute référence ultérieure.

CONTENU DU COLIS

1 base de téléphone, 1 combiné sans fil, 1 adaptateur de courant, 1 cordon téléphonique, 1 batterie NiMh, 1 guide de démarrage rapide.

INSTALLATION

Branchement du téléphone

Branchez le câble téléphonique dans la base en (C) et dans la prise murale (B).

Branchez la fiche de l'adaptateur de courant dans la base (et dans le chargeur CC) (A) puis branchez la fiche de l'adaptateur de courant dans la prise secteur (D).

Utilisez uniquement l'adaptateur fourni avec le téléphone.

Branchement de la batterie

Branchez le connecteur de batterie de dans la prise située à l'intérieur du compartiment de batterie du combiné.

Insérez la batterie fournie, comme indiqué.

Alignez le couvercle à plat sur le compartiment de batterie, puis le faire glisser jusqu'au clic.



Chargement des batteries

Chargez les batteries pendant au moins 12 heures avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Unité de base

1- LOCALISATEUR DU COMBINÉ

Lorsque le téléphone est en veille, presser pour faire sonner tous les combinés.

2- UTILISATION

ACTIVÉ lorsque l'on utilise les combinés ou lorsque le système répond à un appel entrant.

ACTIVÉ lorsqu'un combiné est en cours d'enregistrement.

Clignote en cas d'appel entrant ou lors du désenregistrement des combinés.

Clignote lorsqu'un autre téléphone est utilisé sur la même ligne.

3- COMPTEUR DE MESSAGES

Clignote en cas d'appel entrant.

4- IGNORER

Pressez sur la touche pour passer au message suivant.

5- VOL (▲)

Appuyez sur la touche pour augmenter le volume d'écoute pendant la lecture d'un message. Lorsque l'appareil est en veille, appuyez sur la touche pour augmenter le volume de sonnerie de l'unité de base.

6- LIRE/STOP

Appuyez sur la touche pour démarrer ou arrêter la lecture d'un message.

7- RÉPONDEUR ON

Appuyez sur la touche pour activer/désactiver le répondeur.

8- X/SUPPRIMER

Appuyez sur la touche pour supprimer le message en cours de lecture.

Appuyez longuement pour supprimer tous les anciens messages lorsque le téléphone n'est pas utilisé.

9- VOL (▼)

Appuyez sur la touche pour diminuer le volume d'écoute pendant la lecture d'un message. Lorsque l'appareil est en veille, appuyez sur la touche pour diminuer le volume de sonnerie de l'unité de base.

10- RÉPÉTER

Appuyez sur la touche pour répéter un message. Pressez deux fois pour lire le message précédent.

Combiné

11. ECOUTEUR

12. ÉCRAN LCD

13. VOYANT DE CHARGE (🔌)

Constamment allumée lorsque le combiné est en cours de chargement dans le chargeur.

14. MENU/OK (☰)

En mode veille : appuyez sur la touche pour accéder au menu principal.

En mode de sous-menu : appuyez sur la touche pour confirmer la sélection.

Au cours d'un appel : appuyez sur la touche pour accéder à l'interphone / au répertoire téléphonique / à la liste de reconfigurations / liste des appels.

15. VERS LE HAUT/LISTE DES APPELS (?👤)

En mode veille : appuyez sur la touche pour accéder à la liste des appels.

En mode menu : appuyez sur la touche pour faire défiler vers le haut les éléments du menu.

Dans le répertoire téléphonique/la liste des reconfigurations/la liste des appels : appuyez sur la touche pour faire défiler la liste vers le haut.

En mode de modification : appuyez sur la touche pour déplacer le curseur d'un caractère vers la gauche.

Au cours d'un appel : appuyez sur la touche pour augmenter le volume d'écoute.

Lorsque le téléphone sonne: appuyez sur la touche pour augmenter le volume de la sonnerie.

16. CONVERSATION TÉLÉPHONIQUE (📞)

En mode veille / pré numérotation: appuyez sur la touche pour passer un appel en mode écouteur.

Dans le répertoire téléphonique / la liste des reconfigurations / la liste des appels: appuyez sur la touche pour passer un appel à l'entrée sélectionnée dans la liste en mode écouteur.

Lorsque le téléphone sonne: appuyez sur la touche pour répondre à un appel en mode écouteur.

17. VERS LE BAS/LISTE DE RECOMPOSITION (📞)

En mode veille : appuyez sur la touche pour accéder à la liste des reconfigurations.

En mode menu : appuyez sur la touche pour faire défiler vers le bas les éléments du menu.

Dans le répertoire téléphonique/la liste des reconfigurations/la liste des appels : appuyez sur la touche pour faire défiler la liste vers le bas.

En mode de modification : appuyez sur la touche pour déplacer le curseur d'un caractère vers la droite.

Au cours d'un appel : appuyez sur la touche pour diminuer le volume d'écoute.

Lorsque le téléphone sonne : appuyez sur la touche pour diminuer

le volume de la sonnerie.

18. HAUT-PARLEUR (🔊)

En mode veille / pré numérotation: appuyez sur la touche pour passer un appel en mode haut-parleur. Ré appuyez sur la touche pour passer en mode écouteur.

Dans le répertoire téléphonique / la liste des reconfigurations / la liste des appels: appuyez sur la touche pour passer un appel au numéro sélectionnée dans la liste en mode haut-parleur. Ré appuyez sur la touche pour passer en mode écouteur.

Lorsque le téléphone sonne: appuyez sur la touche pour répondre à un appel en mode haut-parleur. Ré appuyez sur la touche pour passer en mode écouteur.

19. MICRO

20. AMPLIFICATION DU SON (🔊)

Au cours d'un appel : appuyez sur la touche pour activer / désactiver la fonction d'amplification du son.

21. ANNULATION/SECRET (🔒)

En mode menu principal : appuyez sur la touche pour revenir à l'écran de veille.

En mode de sous-menu : appuyez sur la touche pour revenir au menu précédent.

En mode de sous-menu : maintenez la touche enfoncée pour revenir à l'écran de veille.

En mode de modification/pré numérotation : appuyez sur la touche pour supprimer un caractère / chiffre.

En mode de modification/pré numérotation : maintenez la touche enfoncée pour supprimer tous les caractères / chiffres.

Au cours d'un appel : appuyez sur la touche pour désactiver / réactiver le micro.

Lorsque le téléphone sonne : appuyez sur la touche pour désactiver la sonnerie du combiné.

En mode veille : appuyez sur la touche pour utiliser l'interphone avec un autre combiné.

22. RACCROCHER (📞)

Au cours d'un appel : appuyez sur la touche pour raccrocher un appel et pour revenir à l'écran de veille. Appuyez sur la touche pour revenir au menu précédent.

En mode menu/de modification : maintenez la touche enfoncée pour revenir à l'écran de veille.

En mode veille : maintenez la touche enfoncée pour éteindre le combiné.

maintenez la touche enfoncée pour allumer le combiné éteint.

23. PAVÉ ALPHANUMÉRIQUE, (*on), (#x)

En mode de pré numérotation ou de modification : appuyez sur la touche pour insérer un chiffre / caractère /*/#.

*on touche en mode veille : maintenez la touche enfoncée pour activer ou désactiver le verrouillage du pavé.

#x touche en mode veille : maintenez la touche enfoncée pour activer ou désactiver la sonnerie.

0 touche 0 en mode veille/de pré numérotation / mode de modification du numéro : maintenez la touche enfoncée pour insérer une pause.

24. R

Au cours d'un appel : appuyez sur la touche pour répondre à un nouvel appel si vous êtes abonnés au service de mise en attente des appels.

25. RÉPERTOIRE TÉLÉPHONIQUE (📖)

En mode inactif: appuyez sur la touche pour accéder au répertoire téléphonique.




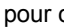
Les réglages du téléphone sont toujours définis de manière similaire:

Appuyez sur la touche **Menu / OK** (☰) pour ouvrir le menu principal. Puis utilisez les touches ▼▲ pour sélectionner une entrée et confirmez-la en pressant la touche **Menu / OK** (☰).

Le code **PIN** par défaut est : **0000**

Exemple :

Définir la langue sur le combiné

Appuyez sur **MENU/OK** , puis sélectionnez REGL COMBINÉ avec **▼▲**, appuyez sur **MENU/OK** , et choisissez la langue **▼▲**, appuyez sur **MENU/OK** , puis sélectionnez la langue souhaitée **▼▲** et ré appuyez sur **MENU/OK**  pour confirmer.

RÉGLAGES DU MENU

Combiné

RÉPERTOIRE TÉLÉPHONIQUE

► AFFICHAGE DE LA LISTE

sous une entrée : ► AJOUTER ► VISIONNER ► MODIFIER
► SUPPRIMER ► TOUT SUPPRIMER ► ÉTAT MEM ►
COMPOSITION RAPIDE

JOURNAL DES APPELS

► AFFICHAGE DE LA LISTE

sous une entrée : ► AJOUTER AU REP ► SUPPRIMER ► TOUT
SUPPRIMER ► DÉTAILS ► TYPE D'APPEL

RÉGLAGES BASE

► SONNERIE BASE ► VOLUME SONNERIE ► SUPPRIMER UN
COMBINÉ ► MODE NUMEROTATION ► TEMPS FLASH ►
MODIFIER CODE PIN

RÉGLAGES DU COMBINÉ

► SONNERIE ► ALERTE SON ► CHOIX BASE ► LANGUE
► NOM COMBINÉ ► AFFICHAGE ► RÉPONDRE
AUTOMATIQUEMENT

MÉM. DIRECTES : ► M1-M2-M3-M4

DATE ET HEURE

► FORMAT DE LA DATE ► FORMAT DE L'HEURE ► DÉFINIR
L'HEURE ► DÉFINIR LA DATE

ALARME : ► ON ► OFF

ASSOCIER : ► BASE 1, 2, 3 ou 4

REGLAGE PAR DÉFAUT : ► PIN ? 0000 par défaut

RÉPONDEUR


► LIRE MSG ► TOUT SUPPRIMER ► MÉMO ► REP ON/OFF
► RÉGLAGES REP (MODE RÉPONSE, LANGUE REP,
ANNONCES, NB DE SONNERIE, TEMPS
D'ENREGISTREMENT, COMPRESSION, FILTRAGE, CODE INT,
MODIFIER CODE PIN)

ENREGISTREMENT DU COMBINÉ

Remarque : le combiné et la station de base ont été préenregistrés. Il est possible d'enregistrer jusqu'à cinq combinés dans une station de base.

En cas de réenregistrement, le code PIN est **0000**.

Enregistrement d'un combiné

Sur le combiné: appuyez sur **MENU/OK** , sélectionnez **ASSOCIER ▼▲**



Appuyez sur **MENU/OK** , sélectionnez BASE (1-4) **▼▲**,
Appuyez sur **MENU/OK** , entrez un code PIN de 4 chiffres pour la base.




Simultanément sur la **base** : maintenez enfoncée la touche du

LOCALISATEUR DE COMBINÉ  pour entrer en mode d'enregistrement.

Après un bref délai, si l'enregistrement a réussi, un bip de confirmation sera émis et l'écran du combiné repassera en mode désactivé puis le numéro du nouveau combiné s'affichera.


Désenregistrement

Sur le combine : Appuyez sur **MENU/OK** , sélectionnez **RÉGL BASE** avec **▼▲**, appuyez sur **MENU/O** , sélectionnez

SUPPR COMBINÉ avec **▼▲**, appuyez sur **MENU/OK** , entrez PIN **0000**, appuyez sur **MENU/OK** , sélectionnez un des numéros de combiné à désenregistrer **▼▲**, appuyez sur **MENU/ OK**  pour confirmer.

INTERPHONE

Appel interne


Appuyez sur **MENU/OK** , entrez au clavier le numéro de combiné souhaité.


REMARQUE: Si seul un des combinés sans fil est enregistré dans la station de base, la fonction d'appel interne ne sera pas disponible.

Appeler tous les combinés

Appuyez sur **MENU/OK** , Entrez « 9 » au clavier.


Transfert d'un appel externe

Appuyez sur **MENU/OK** , sélectionnez INTERPHONE **▼▲**,

Appuyez sur **MENU/OK** , entrez au clavier le numéro de combiné souhaité.

Une fois la connexion établie, raccrochez l'appel sur le combiné.

Audiocoférence

Appuyez sur **MENU/OK** , sélectionnez INTERPHONE **▼▲**,

Appuyez sur **MENU/OK** ,

Entrez au clavier le numéro de combiné souhaité.

Une fois la connexion établie, appuyez sur **X** jusqu'à ce que CONFÉRENCE s'affiche.

REMARQUE: La partie qui raccroche au cours d'une audiocoférence laissera l'autre partie en communication avec la partie externe.


RÉPERTOIRE TÉLÉPHONIQUE

Votre téléphone peut stocker jusqu'à 50 entrées avec nom et numéros de téléphone dans le combiné sans fil et l'unité de base du téléphone. Un maximum de 20 chiffres pour le numéro et de 12 caractères pour le nom peuvent être enregistrés pour chaque entrée du répertoire téléphonique. Vous pouvez également sélectionner différentes tonalités de sonnerie pour vos entrées incluses dans le répertoire téléphonique.

Les entrées du répertoire téléphonique sont stockées alphabétiquement.

Pour ajouter une nouvelle entrée

En mode veille :

Appuyez sur **MENU/OK** , sélectionnez RÉPERTOIRE **▼▲** pour accéder à la liste (pleine ou vide),

Appuyez sur **MENU/OK** , pour sélectionner AJOUTER.

Appuyez sur **MENU/OK** , NOM s'affiche, entrez le nom.

Appuyez sur **MENU/OK** , NUMÉRO s'affiche, entrez le numéro.

Appuyez sur **MENU/OK** , et **▼▲** pour sélectionner la tonalité de sonnerie souhaitée pour votre entrée.


Appuyez sur **MENU/OK** , **pour enregistrer.**


REMARQUE : Vous devez enregistrer les mémoires dans chaque combiné car elles peuvent être différentes.

MÉM. DIRECTE

La base de votre appareil AMPLIDECT295 peut également être jumelée avec des combinés supplémentaires ou avec certains combines / dispositifs spécifiques, comme nos modèles PhotoDECT295 ou EMERGENCY295 qui nécessitent la programmation de numéros de mémoire directe dans la base. Ces numéros (4 au maximum) doivent être ajoutés par le biais du combiné régulier.

Sur le combiné : appuyez sur **MENU/OK** , sélectionnez **MÉM. DIRECTES** avec **▼▲**,

Appuyez sur **MENU/OK** , sélectionnez M1-M2-M3-M4 avec **▼▲**,

Appuyez sur **MENU/OK** , entrez le numéro, puis appuyez sur OK.

Répondeur numérique

Votre base inclut un répondeur téléphonique qui enregistre les appels non répondus lorsqu'il est activé. Le répondeur peut stocker jusqu'à 59 messages dans la période d'enregistrement maximale d'environ 15 minutes. En outre d'enregistrer les messages entrant, vous pouvez enregistrer des mémos pour les autres utilisateurs du téléphone.

Appuyez sur **ON/OFF** pour **ACTIVER** ou **DÉSACTIVER** le répondeur téléphonique.

Opérations à distance

Si vous n'êtes pas à la maison, vous pouvez appeler pour activer ou désactiver votre répondeur et écouter vos messages à distance à l'aide d'un autre téléphone à numérotation fréquence vocale.

1. Passez un appel depuis un téléphone à composition par tonalité.
2. Lorsque le répondeur répond à l'appel et commence à lire l'annonce, appuyez sur **X**.
3. Entrez le code PIN d'accès à distance à 4 chiffres (le PIN par défaut est 0000).
4. Appuyez sur les touches suivantes pour activer la fonction souhaitée.

Fonctions	
	Lorsque la lecture du message n'a pas été lancée
2	Supprimer la lecture du message actuel
4	Répéter depuis le début la lecture du message actuel. Appuyer deux fois sur la touche pour revenir au message précédent.
5	Lecture du message
6	Utiliser la touche Saut en avant pour lire le message suivant message
7	Activation du répondeur
8	Arrêter la lecture du message actuel
9	Désactivation du répondeur
*	Entrer le PIN d'accès à distance à 4 chiffres

REMARQUE: Lorsque la mémoire de votre répondeur est pleine et que le mode est RÉP. ET ENREGISTRER, l'appareil passe automatiquement en mode de RÉPONSE UNIQUEMENT.

Il reviendra automatiquement en mode RÉP ET ENREGISTRER après la suppression de plusieurs messages.

Vous ne pourrez pas supprimer les nouveaux messages avant de les avoir écoutés.

GARANTIE

Votre produit Geemarc est garanti pendant 2 ans, suivant la date d'achat. Au cours de cette période, toutes les réparations ou tous les remplacements(à notre seule discrétion) seront effectués sans frais. En cas de problème, contactez notre service d'assistance ou rendez-vous sur notre site Web: **www.geemarc.com**. La garantie ne couvre pas les accidents, la négligence ou les ruptures de pièces. Le produit ne doit pas être altéré ou démonté par quiconque n'étant pas un représentant agréé de Geemarc. La garantie de Geemarc ne limite en aucun cas vos droits légaux.

IMPORTANT: VOTRE FACTURE FAIT PARTIE DE VOTRE GARANTIE ET DOIT ETRE CONSERVÉE ET PRODUITE LORS D'UNE RÉCLAMATION SOUS GARANTIE.

Veillez noter : la garantie est applicable en France uniquement.

DÉCLARATION:

Directives CE


CE Geemarc Telecom SA déclare par la présente que son produit est conforme aux exigences essentielles ainsi qu'à d'autres directives pertinentes de la norme 2014/53/UE traitant des équipements terminaux de radio et télécommunications, en particulier à l'article 3, sections 1a, 1b et section 2. L'appareil ne fonctionne pas si le courant de ligne est inférieur à 18 mA.

La déclaration de conformité peut être consultée sur **www.geemarc.com**

Branchement électrique: l'appareil est conçu pour fonctionner avec une source électrique de 230V 50Hz uniquement. (Répertorié comme affichant une tension dangereuse sous les termes de la norme EN60950). L'appareil n'incorpore aucun interrupteur intégral Marche/Arrêt. Pour déconnecter l'appareil, coupez l'alimentation au niveau de la prise secteur ou débranchez l'adaptateur secteur. Lors de l'installation de l'appareil, veillez à ce que la prise secteur soit facilement accessible.

Branchement du téléphone: Les tensions présentes sur le réseau de télécommunications sont répertoriées en tant que TNV-3 (Telecommunication Network Voltage), conformément à la norme EN60950.

DIRECTIVE DE RECYCLAGE

 Le système DEEE (déchets des équipements électriques et électroniques) a été mis en œuvre pour les produits en fin de vie qui seront recyclés de la meilleure manière possible. Lorsque ce produit ne fonctionne plus, ne le jetez pas avec vos déchets domestiques.

Veillez utiliser une des options suivantes:

- Retirez les piles et jetez-le dans une benne DEEE appropriée. Jetez le produit dans une benne DEEE appropriée.

- Ou rapportez-le à votre détaillant. Si vous achetez un nouvel article, l'ancien devrait être accepté.

Ainsi, en respectant ces instructions, vous contribuez à la santé publique et à la protection de l'environnement.



N'hésitez-pas à consulter notre site Internet pour obtenir des informations et de l'aide sur nos produits :

2 rue Gaillée, 59791 GRANDE-SYNTHE CEDEX
FRANCE

www.geemarc.com

Téléphone **0328587599** ou fax **0328587576**