

# Notice adaptateur smartphone universel HEINE DELTAone et DELTA 30.

Documentation numérique en dermatoscopie avec la caméra de votre smartphone.

## SIMPLE COMME BONJOUR !




Avec l'adaptateur smartphone universel HEINE, vous pouvez utiliser de manière flexible pratiquement tous les smartphones, indépendamment du système d'exploitation (Android, Windows, ...).

Pour de nombreux modèles d'iPhone\*, HEINE propose dans sa gamme de produits des coques parfaitement adaptées avec adaptateur intégré. Plus d'informations sur [www.heine.com](http://www.heine.com)



Vous avez donc besoin d'un DELTA 30 ou DELTAone, d'un smartphone et de l'adaptateur approprié (pour DELTA 30 ou DELTAone).

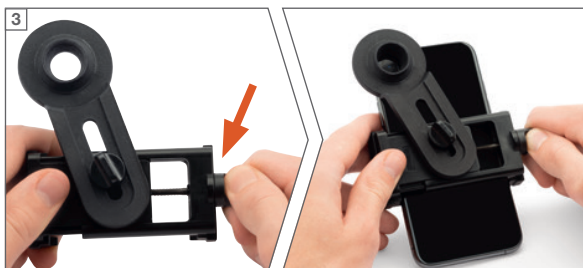

Tournez la vis de type Garrett pour ajuster le support de l'adaptateur à la largeur de votre smartphone. Placez le support à peu près au milieu du dos de votre smartphone et fixez-le à l'aide de la même vis de type Garrett.



Positionnez ensuite l'adaptateur devant la caméra du smartphone : Pour ce faire, desserrez la vis de type Garrett de l'adaptateur jusqu'à ce qu'il puisse pivoter latéralement et se déplacer d'avant en arrière sans difficulté.

Si votre smartphone ne possède qu'une seule caméra, fixez l'adaptateur par le serrage de la vis de type Garrett au milieu devant cette caméra.

Si votre smartphone est équipé de plusieurs caméras, vous devez d'abord vérifier quelle est la caméra principale : Positionnez l'adaptateur de manière à ce que l'une des lentilles de la caméra de votre smartphone se trouve au centre. Le champ de vision du sujet est-il clair dans la vue de la caméra ? Si tout est correct, fixez l'adaptateur devant cette caméra.

**Vous  
y êtes  
presque !**



L'aimant de l'adaptateur maintient maintenant le smartphone sur la bague de mise au point du dermatoscope.

Vous pouvez maintenant prendre des photos avec votre smartphone comme vous en avez l'habitude.

Vous cherchez une solution de documentation numérique ?  
Vous trouverez des informations à ce sujet sur :  
[www.heine.com/fr/digital-documentation-derm](http://www.heine.com/fr/digital-documentation-derm)

\*Apple, le logo d'Apple, l'iPhone et l'iPad sont des marques de Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.  
Sous réserve de modifications techniques. © 2022 HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG. Tous droits réservés.