

NOTICE D'UTILISATION



COUSSIN BIEN ÊTRE CHAUFFANT

Félicitations et merci de votre confiance!

Afin d'obtenir les résultats escomptés et de profiter longtemps de votre **coussin bien être chauffant**, nous vous recommandons de lire attentivement les instructions suivantes concernant l'utilisation, la sécurité et l'entretien.

1. RECOMMANDATIONS

1. Le coussin chauffant vous permet de réchauffer en douceur et de décontracter les parties du corps de manière ciblée. L'utilisation n'est pas prévue en usage hospitalier.
2. En particulier, ne pas utiliser sur des bébés ou enfants, personnes qui sont sensibles à la chaleur, et sur les animaux. Une utilisation autre que décrit sur la notice ou une modification du coussin chauffant ne sont pas permises et peuvent amener à une blessure ou endommager l'appareil.
3. Le revendeur n'assume pas les dommages causés par une mauvaise utilisation du produit.
4. Ne jamais laisser un enfant sans surveillance avec le sac d'emballage. Cela peut causer un étouffement.
5. Ne pas utiliser l'appareil en milieu humide.
6. Ne pas utiliser les câbles principaux pour transporter l'appareil ou suspendre ce dernier. Eviter de tirer sur les câbles pour l'enlever de la prise
7. Maintenir les câbles éloignés de la chaleur, de l'huile et des objets surfaces coupants. Si les câbles sont abîmés, ne pas y toucher et retirer immédiatement de la prise. Les câbles endommagés augmentent le risque de chocs électriques.
8. Ne pas enfoncer des aiguilles ou objets coupants sur le coussin chauffant
9. Si vous utilisez un pacemaker cardiaque, merci de consulter votre docteur ou le fabricant de votre pacemaker avant utilisation du coussin chauffant
10. Avant chaque utilisation, vérifiez attentivement le coussin chauffant. Ne pas l'utiliser si vous voyez une quelconque déformation ou déchirure ou si l'appareil n'a pas été utilisé correctement.
11. Les enfants ou toutes personnes ayant un manque de connaissances ou expérience sur l'utilisation de ce coussin chauffant, ainsi que toutes personnes avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées ne doivent pas utiliser cet appareil sans surveillance ou sans le contrôle d'une personne

responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés afin d'éviter qu'ils ne jouent avec l'appareil.

12. Ne pas utiliser le coussin chauffant par des personnes non responsables, enfants ou personnes insensibles à la chaleur (par exemple : diabétiques, personnes avec une maladie de la peau, personnes ayant une peau sensible, personnes ayant pris des calmants et personnes ayant consommé une quantité excessive d'alcool)
13. Faites attention de ne pas vous endormir durant l'utilisation de l'appareil. L'utilisation excessive du coussin chauffant peut brûler la peau.
14. Ne pas utiliser l'appareil sur des parties enflammées, blessées ou enflées. Vérifiez les suggestions médicales en cas de doute car ces zones peuvent s'aggraver à l'utilisation de l'appareil
15. Les réparations ne peuvent être faites que par des agents habilités ou revendeurs autorisés par le constructeur
16. Connectez à la tension indiquée sur le coussin chauffant
17. Utilisez uniquement en conjonction avec le contrôleur 1 comme indiqué sur le coussin chauffant (étiquetage)
18. Ne pas faire fonctionner l'appareil si celui-ci est plié ou tordu
19. Ne pas causer des plis coupants sur l'appareil
20. Ne pas placer d'objets sur le coussin durant son fonctionnement
21. Ne pas placer une quelconque source de chaleur telle que bouteille d'eau chaude ou similaire, durant son fonctionnement
22. Ne pas couvrir le contrôleur 1 et ne pas le placer dans l'appareil durant son fonctionnement

Systeme de sécurité

Le coussin chauffant est équipé d'un système de sécurité. La technologie de détection électronique empêche la surface entière du coussin chauffant de surchauffer en s'éteignant automatiquement dans l'éventualité d'un dysfonctionnement de l'appareil. Si cela arrive, la température indiquée sur le contrôleur 1 ne sera plus illuminée quand le coussin chauffant est allumé.

En cas de dysfonctionnement, pour raisons de sécurité, merci de retourner le coussin chauffant à l'adresse indiquée et ne pas le réutiliser.

	Merci de bien lire la notice d'utilisation		Attention - surface chauffante
	Tension (Alternative)		Ne pas l'utiliser plié ou tordu
	Hertz (frequence)		Attention - Risques de chocs électriques
	Watt (puissance)		Le coussin chauffant et la housse peuvent être lavés à la machine à 30 degrés doux
	Suivre attentivement les remarques et conseils de sécurité		Ne pas utiliser d'eau de javel
	Protection double isolation		Ne pas sécher le coussin ni la housse
	Gardez les enfants hors de portée de l'appareil		Ne pas repasser le coussin ni la housse
	Risques de chocs électriques dus à un câblage abîmé ou défectueux		Ne pas nettoyer avec produits chimiques ou nettoyage à sec
	Pour utilisation intérieure seulement		Jeter le packaging dans un environnement adéquat
	Ne pas insérer d'aiguille		Jeter le coussin chauffant dans un environnement adéquat

2. DESCRIPTION DES PARTIES

1. Contrôleur (réglages de température avec indicateur DEL), voir figure. A2
2. Connecteur de prise
3. Prise pour contrôleur
4. Housse déhoussable
5. Bandes élastiques pour ajuster à la taille

3. COMPOSITION DE L'ENSEMBLE

Merci de vérifier dès le déballage que le jeu est complet et que le coussin chauffant est en parfait état

1 coussin chauffant

1 connecteur de prise

1 prise pour contrôleur

1 notice

Puissance d'alimentation = 220-240 V ~/50Hz	Dimensions = env 40x 30 cm
Puissance d'entrée = environ 100 W	Protection class II 

4. UTILISATION

Le coussin chauffant peut sentir le plastique durant les premières utilisations, mais ceci est normal et va disparaître petit à petit.

Interrupteur Marche/ Arrêt / Sélection de la température

Pour utiliser l'appareil, merci de connecter d'abord le contrôleur 1 au coussin chauffant en le reliant au connecteur 2. (voir fig. B)

Interrupteur Marche

- Réglez le contrôleur 1 à une température entre 1-3 pour chauffer le coussin chauffant

Interrupteur Arrêt

- Réglez le niveau à 0 sur le contrôleur pour éteindre le coussin chauffant. Si vous allez utiliser le coussin pour plusieurs heures, réglez le contrôleur à 2

Sélection de la température

Régler le niveau au maximum (niveau 3) avant utilisation. Cela permettra une chauffe plus rapide.

Niveau de température

Réglez le niveau de température sur le contrôleur (voir fig. A)

Réglages 0 = Arrêt

Réglages 1+2 = Chauffe faible

Réglages 3+4 = Chauffe moyenne

Réglages 5+6 = Chauffe élevée

Arrêt automatique

NOTE : Le coussin chauffant s'éteint automatiquement après 90 minutes. L'indicateur DEL sur le contrôleur affichera « A »


- Premièrement sélectionnez la position « 0 » et après environ 5 secondes, sélectionnez le niveau de température désiré.

Changez le coussin chauffant à « arrêt » (OFF = Niveau « 0 ») ou retirez les câbles de la prise si vous ne désirez pas utiliser la fonction d'arrêt automatique. Puis pour utiliser l'appareil, merci de connecter d'abord le contrôleur 1 au coussin chauffant en le reliant au connecteur 2. (voir fig. B)

5. NETTOYAGE ET MAINTIEN

- Utilisez le coussin chauffant avec la housse en tissu pour éviter de salir ou endommager l'appareil (particulièrement si vous utilisez des huiles essentielles ou crème)
- Avant le nettoyage du coussin chauffant, toujours retirer les câbles d'alimentation de la prise et séparez le connecteur d'alimentation du contrôleur. (voir fig. B)
- Ne pas reconnecter le contrôleur au coussin chauffant jusqu'à ce que le connecteur et le coussin chauffant soient secs
- Ne pas allumer le coussin chauffant, pour sécher l'appareil.

- Ne pas utiliser des produits chimiques pour nettoyer le coussin chauffant ou contrôleur sinon ces derniers peuvent être abîmés.
- Ne jamais immerger le contrôleur dans l'eau ou autre liquide.
- Ne pas suspendre l'appareil pour le séchage avec des pinces à linge. Cela pourrait l'endommager. Utilisez plutôt un chiffon non-pelucheux et sec pour nettoyer et entretenir le coussin chauffant et le contrôleur
- Pour enlever les taches résistantes du coussin chauffant, vous pouvez tremper légèrement le chiffon avec un détergent doux.
- Ouvrir en premier le velcro de la housse et retirez le coussin chauffant
- Nettoyez la housse en concordance avec les symboles de nettoyage sur l'étiquette
- Le coussin chauffant et la housse sont lavables. Réglez le programme de la machine à laver sur délicat 30 degrés
- Ne pas blanchir. Ne pas utiliser de détergent contenant de l'eau de javel
- Ne pas sécher le coussin chauffant ou la housse au sèche-linge
- Ne pas repasser le coussin chauffant ou la housse
- Ne pas nettoyer avec des produits chimiques/ ou lavage à sec
- Faites attention lorsque vous remplacez le coussin chauffant dans la housse que les câbles soient en dehors de la fermeture. Sinon il ne sera pas possible de fermer la fermeture éclair
- Merci de noter qu'un lavage fréquent peut user le coussin chauffant. Il est recommandé de le laver moins de 10 fois durant sa période de vie
- Il est recommandé de ne pas : le nettoyer à sec, le blanchir, le tordre, l'essorer ou le repasser

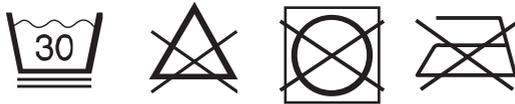

6. STOCKAGE

- Il est conseillé de laisser le coussin se refroidir avant de l'entreposer
- Afin d'éviter les plis importants, ne pas poser d'autres objet sur le coussin chauffant
- Si vous n'avez pas l'intention d'utiliser le coussin chauffant durant une longue période, conservez le dans son packaging original dans un environnement sec et sans poser du poids dessus

7. GARANTIE

La garantie pour cet appareil est de 2 ans à la date d'achat

La garantie est annulée :

En cas d'utilisation impropre ou abusive, d'utilisation violente durant manipulation.

La période de garantie ne sera pas étendue si une réparation est effectuée durant la garantie. Cela s'applique également pour tout remplacement ou réparation des accessoires. Tout dommage découvert à l'achat du produit durant déballage doit être immédiatement retourné au plus tard 2 jours après la date d'achat.

Les réparations faites après la date d'expiration de la garantie est sujet à facturation.

Notes sur les déclarations de conformité CE.

En conformités avec les exigences essentielles et autres pertinentes clauses, cet appareil est conforme aux directives de compatibilité électromagnétique 2004/108/EC et directive basse tension 2006/95/EC



1. ELIMINATION DE L'APPAREIL

Le packaging est fait entièrement en matière recyclable que vous pouvez jeter dans un conteneur de déchet recyclable.

Ne pas jeter les parties électriques avec les déchets ménagers !

En conformité avec la directive européenne 2002/ 96/ EC et sa transposition avec la législation nationale, les parties électriques doivent être collectées séparément et recyclées correctement.

Contactez vos autorités locales pour plus de détails sur la manière de se débarrasser correctement des parties électriques.

