

**geemarc™ AMPLIDECT™ 595 Photo**  
Hear the Difference

**Téléphone amplifié avec répondeur**



**Français**

# TABLE DES MATIÈRES

<b>1.</b>	<b>CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES .....</b>	<b>4</b>
<b>2.</b>	<b>MISE EN PLACE DU TÉLÉPHONE .....</b>	<b>5</b>
2.1	Contenu de l'emballage.....	5
2.2	Emplacement.....	5
2.3	Connectez la Station de Base .....	6
2.4	Installer et charger la batterie du combiné.....	7
<b>3.</b>	<b>APPRENEZ À CONNAÎTRE VOTRE TÉLÉPHONE .....</b>	<b>8</b>
3.1	Vue d'ensemble du combiné .....	8
3.2	Vue d'ensemble de la Base.....	11
3.3	Symboles et icônes affichage LCD du combiné.....	13
3.4	Structure du Menu du combiné.....	14
3.5	Texte et tableau d'entrée à chiffres.....	15
3.5.1	Caractères français.....	15
<b>4.</b>	<b>UTILISEZ VOTRE TÉLÉPHONE .....</b>	<b>16</b>
4.1	Passer un appel externe.....	16
4.1.1	Prénumérotation .....	16
4.1.2	Appel direct.....	16
4.1.3	Appelez à partir du répertoire .....	16
4.1.4	Appelez à partir de la liste d'appels .....	16
4.1.5	Appel à partir d'une photo de la base .....	16
4.1.6	Appelez à partir de la liste des numéros bis .....	17
4.1.7	Minuterie d'appel.....	17
4.2	Répondre à un appel .....	17
4.3	La fonction Volume amplifié .....	17
4.4	Terminer un appel .....	18
4.5	Ajuster le Volume de l'écouteur ou du haut-parleur.....	18
4.6	Mettre un appel en mode secret .....	18
4.7	Recomposer l'un des derniers numéros composés .....	19
4.7.1	Recomposer un numéro depuis la liste des numéros bis .....	19
4.7.2	Enregistrer un numéro de rappel dans le répertoire.....	19
4.7.3	Supprimer un numéro de rappel.....	19
4.7.4	Supprimer toute la liste de rappel.....	20
4.8	Recherche de combiné .....	20
4.9	Effectuer un appel interne.....	20
4.9.1	Intercom.....	20
4.9.2	Appeler tous les combinés .....	21
4.9.3	Transférer un appel externe .....	21
4.9.4	Faire une conférence à 3 .....	21
<b>5</b>	<b>REPertoire TÉLÉPHONIQUE .....</b>	<b>22</b>
5.1	Ajouter un nouveau contact téléphonique .....	22
5.2	Recherche d'un contact téléphonique.....	22
5.3	Afficher un contact du répertoire téléphonique.....	22

5.4	Modifier un contact téléphonique .....	23
5.5	Supprimer un contact téléphonique .....	23
5.6	Supprimez l'Ensemble du Répertoire .....	23
5.7	Place disponible dans le répertoire .....	24
5.8	Définir les numéros de numérotation rapide .....	24
5.8.1	Ajouter ou modifier le numéro de numérotation rapide.....	24
5.8.2	Supprimer un numéro de numérotation rapide.....	24
5.9	Définir les numéros VIP .....	25
5.9.1	Ajouter ou modifier le numéro VIP .....	25
5.9.2	Voir un numéro VIP .....	25
5.9.3	Supprimer un numéro ou tous les VIP .....	25
5.9.4	Etat du mode VIP .....	25
<b>6</b>	<b>AFFICHAGE DE L'APPELANT (DÉPEND DU RÉSEAU) .</b>	<b>26</b>
6.1	Afficher la liste des appels manqués.....	26
6.2	Détail d'un appel manqué .....	26
6.3	Enregistrer un numéro de liste d'appel dans le répertoire .....	26
6.4	Mettre un appel manqué en liste noire .....	27
6.5	Supprimer une entrée dans le journal .....	27
6.6	Supprimer toute la liste des appels manqués.....	27
<b>7</b>	<b>TOUCHES MÉMOIRES PHOTOS.....</b>	<b>28</b>
7.1	Enregistrement d'une mémoire photo.....	28
7.2	Enregistrement d'un nom vocal .....	28
<b>8</b>	<b>REGLAGES DU TÉLÉPHONE .....</b>	<b>29</b>
8.1	Réglages du combiné.....	29
8.1.1	Définir la mélodie de sonnerie pour les appels internes ..	29
8.1.2	Définir la mélodie de sonnerie pour les appels externes ..	29
8.1.3	Régler le Volume de la sonnerie .....	30
8.1.4	Définir la Tonalités d'alerte .....	30
8.1.5	Définir la langue du combiné .....	30
8.1.6	Paramètres de l'horloge .....	31
8.1.6.1	Définir le format de la DATE .....	31
8.1.6.2	Définir le format de l'heure .....	31
8.1.6.3	Régler l'heure et la Date .....	31
8.1.7	Enregistrement d'un combiné supplémentaire .....	32
8.1.8	Initialisation du combiné .....	32
8.2	Réglages de la base en utilisant le combiné .....	33
8.2.1	Régler la mélodie de sonnerie .....	33
8.2.2	Réglage du volume de sonnerie .....	33
8.2.3	Régler le temps de Flash .....	33
8.2.4	Retirer la 1 ère sonnerie .....	33

<b>9</b>	<b>APPEL SOS</b>	
9.1	Réglages SOS.....	34
9.2	Faire un appel SOS.....	34
9.3	Sélection du langage pour le message SOS.....	34
9.4	Enregistrement du message SOS.....	35
9.5	Ecouter le message SOS .....	35
9.6	Effacer le message SOS .....	35
<b>10</b>	<b>FONCTION ALARME.....</b>	<b>36</b>
10.1	Activer/Désactiver l'alarme .....	36
10.2	Renommer le nom d'une alarme.....	36
10.3	Régler la mélodie de sonnerie .....	36
10.4	Enregistrement d'un mémo vocal pour une alarme.....	37
10.5	Ecouter un message vocal d'une alarme.....	37
10.6	Effacer un message vocal .....	37
<b>11</b>	<b>FONCTION AIDE VOCAL.....</b>	<b>37</b>
<b>12</b>	<b>FONCTION RÉPONDEUR .....</b>	<b>38</b>
12.1	Mise en marche/arrêt du répondeur.....	38
12.2	Écouter les Messages du répondeur .....	38
12.3	Supprimer tous les Messages du répondeur .....	39
12.4	Enregistrement d'un mémo .....	39
12.5	Réglages du répondeur .....	40
12.5.1	Enregistrer votre annonce .....	40
12.5.2	Lecture du Message sortant (OGM) .....	40
12.5.3	Supprimer une annonce personnalisée.....	41
12.5.4	Définir le nombre de sonnerie avant décrochage.....	41
12.5.5	Définir la durée d'enregistrement du Message entrant.....	41
12.5.6	Définir la langue du répondeur .....	42
12.5.7	Activer ou désactiver l'écoute pendant l'enregistrement ..	42
12.5.8	Activer l'accès à distance .....	42
12.5.8.1	Modifier le code PIN à 4 chiffres de l'accès à distance ..	42
12.5.8.2	Activer ou désactiver l'accès à distance .....	43
12.5.8.3	Bip d'alerte nouveau message	
12.5.8.4	Opérations à distance.....	44
<b>13</b>	<b>DÉPANNAGE.....</b>	<b>45</b>
<b>14</b>	<b>SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES .....</b>	<b>48</b>
<b>15</b>	<b>INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE .</b>	<b>49</b>
<b>16</b>	<b>GARANTIE.....</b>	<b>50</b>
<b>17</b>	<b>DÉCLARATIONS .....</b>	<b>50</b>

# CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lorsque vous utilisez votre équipement téléphonique, les précautions élémentaires de sécurité ci-dessous doivent être prises en compte afin de réduire le risque d'incendie, de choc électrique et de blessure, notamment les suivantes :

1. Lisez et comprenez toutes les instructions.
2. Suivez tous les avertissements et les instructions inscrites sur le produit.
3. Débranchez l'appareil de la prise murale avant de le nettoyer. N'utilisez pas de nettoyants liquides ou en aérosol. Utilisez un chiffon humide pour le nettoyage.
4. N'utilisez pas cet appareil près de l'eau (par exemple près d'une baignoire, un évier de cuisine, piscine).
5. N'exposez pas le téléphone à la lumière du soleil ou au froid extrêmes de son emplacement. Ne placez pas le téléphone à proximité d'une source de chaleur comme les radiateurs, fours, etc.
6. Ne surchargez pas les prises murales ou les rallonges, car cela peut entraîner un risque d'incendie ou un choc électrique.
7. Débranchez l'appareil de la prise murale et adressez-vous au distributeur sous les conditions suivantes :
  - Lorsque le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé ou effiloché.
  - Si le produit ne fonctionne pas normalement en suivant les instructions d'utilisation.
  - Si le produit a chuté et le boîtier a été endommagé.
  - Si le produit présente un changement distinct dans la performance.
8. Évitez d'utiliser le téléphone (autre qu'un type sans fil) pendant un orage. Il peut y avoir un risque d'électrocution par la foudre.
9. N'utilisez pas le téléphone pour signaler une fuite de gaz dans le voisinage.
10. Utilisez uniquement le pack de batterie NiMH (Nickel métal hydrure-) fourni ! Les périodes de fonctionnement pour les combinés ne s'appliquent qu'avec les capacités de batterie par défaut.
11. L'utilisation d'autres types de piles ou de batteries/piles non rechargeables peuvent être dangereuse. Ils peuvent causer des interférences ou un endommagement de l'appareil. Le fabricant ne se tiendra pas responsable des dommages découlant de cette non-conformité.
12. N'utilisez pas de baies de chargement de tiers. La batterie peut être endommagée.
13. La batterie ne doit pas être exposé à une chaleur excessive comme le soleil ou un incendie et être immergé dans l'eau.
14. Pour les appareils connectables, la prise de courant (adaptateur) doit être installée près de l'équipement et doit être facilement accessible.

## AVERTISSEMENT pour la mise en recyclage

1. Lorsque le symbole de la poubelle sur roues barrée est attaché à un produit, Cela signifie que le produit est couvert par la Directive 2002/96/ce européenne.
2. Tous les produits/batterie électrique et électronique doit être jeté séparément des déchets municipaux par l'intermédiaire de sites de collecte désignés, nommés par le gouvernement ou les autorités locales.
3. Le recyclage de votre ancien appareil/batterie aidera à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la bonne santé.



Pour plus d'informations sur le recyclage de votre ancien appareil/batterie, veuillez contacter votre mairie, service de recyclage des déchets ou le magasin où vous avez acheté le produit.

## **2. MISE EN PLACE DU TÉLÉPHONE**

### **2.1 Contenu de l'emballage**

L'emballage contient les éléments suivants :

- Station de base photo
- Combiné sans fil
- Adaptateur secteur
- 3 batteries rechargeables NiMH
- 1 cordon de ligne téléphonique
- 1 manuel d'utilisation

### **2.2 Emplacement**

Pour une couverture maximale et afin de réduire les interférences, voici quelques conseils, que vous devriez considérer lorsque vous placez l'unité de base,

- Placez-le à un endroit pratique, haut et central avec aucun obstacle entre le combiné et l'unité de base dans votre intérieur.
- Placez-le loin des appareils électroniques tels que les appareils sans fil, radios, téléviseurs, ordinateurs personnels, fours à micro-ondes ou autres téléphones sans fil.
- Éviter d'être en face de fréquence radio émetteurs, tels que les antennes externes des stations de téléphonie mobile cellulaire.
- Éviter de le brancher sur le même circuit que d'autres gros appareils ménagers électriques en raison du risque d'interférence. Essayez de déplacer l'appareil ou l'unité de base à une autre prise de courant.

Si la réception pour un emplacement de l'unité de base n'est pas satisfaisante, déplacez-le vers un autre emplacement pour une meilleure réception.


Selon les conditions environnantes ainsi que des facteurs spatio-temporels, la portée peut être réduite. La portée à l'intérieur est normalement inférieure à l'extérieur.

## 2.3 Connectez la Station de Base

Branchez l'extrémité de l'adaptateur secteur dans une prise électrique non contrôlée par un interrupteur mural

Faire passer les cordons dans les rainures.

Branchez la petite extrémité de l'adaptateur secteur à la prise d'alimentation à l'arrière de la base du téléphone.

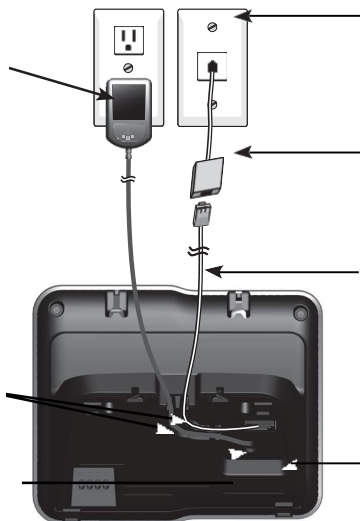

Branchez le cordon sur une prise téléphonique ou un filtre ADSL.

Un filtre ADSL (non fourni) est nécessaire si vous avez service d'Internet ADSL. Le filtre ADSL doit être branché sur la prise téléphonique murale.

Cordon de ligne.


Branchez l'autre extrémité du cordon téléphonique dans la prise de **TEL. LINE** à l'arrière de la base du téléphone.

### **REMARQUE :**

Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni avec la station de base

## 2.4 Installer et charger la batterie du combiné

1. Faites glisser le couvercle des batteries vers le bas. Installez les 3 batteries dans le compartiment, tel qu'indiqué, en respectant la polarité (+, -)

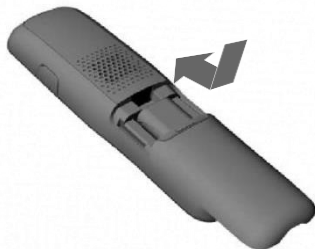

2. Aligned le couvercle contre le compartiment à piles et puis faites-le glisser jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
1. Chargez le combiné en le plaçant face vers l'avant dans le chargeur. Vous entendez un bip lorsque le combiné est en charge dans le chargeur.


### **REMARQUES**

- Utilisez uniquement les batteries rechargeables NiMH
- Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période, retirez les batteries pour éviter les éventuelles fuites de liquide.



# 3 CONNAÎTRE VOTRE TÉLÉPHONE

## 3.1 Vue d'ensemble du combiné

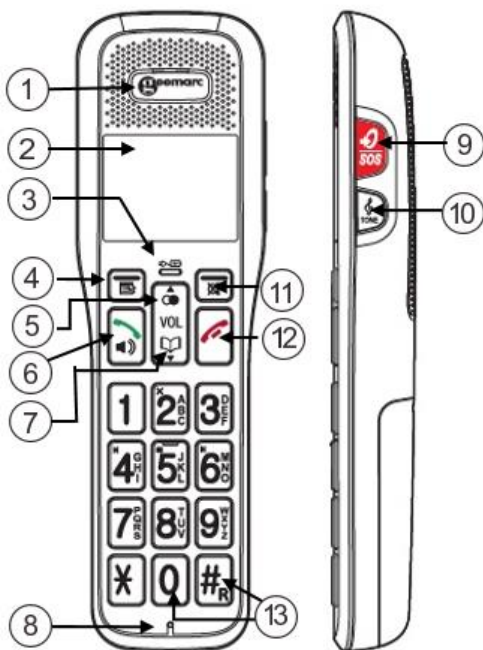

1. ÉCOUTEUR

2. AFFICHAGE LCD

3. VOYANT DE CHARGE (  )

Allumé lorsque le combiné est en charge dans le chargeur.

4. TOUCHE MENU/OK (  )

**En mode veille** : Appuyez pour accéder au menu principal.

**Dans le mode sous-menu** : Appuyez pour confirmer la sélection.

**Pendant un appel** : Permet d'accéder à l'interphone/répertoire/liste d'appels.

## 5. HAUT/APPEL (📞)

**En mode veille** : Appuyez pour accéder à la liste des appels entrants.

**Menu** : Appuyez pour faire défiler vers le haut les éléments du menu.

**Liste des contacts/Liste de recomposition/appe**l : Appuyez pour défiler vers le haut.

**Mode édition** : déplacer le curseur d'un caractère vers la gauche.

**Pendant un appel** : Appuyez pour augmenter le volume d'écoute.

## 6. CONVERSATION (📞) HAUT-PARLEUR (🔊)

**Mode veille /pré-numérotation** : Appuyez pour effectuer un appel en mode écouteur.

**Dans le répertoire téléphonique/la liste des recombpositions / la liste des appels:** appuyez sur la touche pour téléphoner à la personne sélectionnée dans la liste.

**Lorsque le téléphone sonne:** appuyez sur la touche pour répondre à un appel.

**En ligne:** appuyez sur la touche pour passer en mode Mains libres. Appuyez sur la touche pour repasser en mode normal.

## 7. LISTE VERS LE BAS/LISTE DE RECOMPOSITION (📞)

**En mode veille** : Appuyez pour accéder à la liste de recomposition.

**Dans le menu:** Appuyez pour faire défiler vers le bas les éléments de menu.

**Liste des contacts/Liste de recomposition/appe**l : Appuyez pour faire défiler la liste vers le bas.

**En mode d'édition** : Appuyez sur pour déplacer le curseur d'un caractère vers la droite.

**Pendant un appel** : Appuyez dessus pour diminuer le volume d'écoute

## 8. MICROPHONE

## 9. MODE AMPLIFIÉ (🔊) SOS KEY

**Au cours d'un appel** : appuyez sur la touche pour activer / désactiver la fonction d'AMPLIFICATION DU SON

**En mode veille:** maintenez la touche enfoncée pendant 3 secondes pour démarrer la séquence d'appel d'urgence définie sur votre combiné.

**En mode d'appel** : maintenez la touche enfoncée pendant 2 secondes pour arrêter l'appel d'urgence.

## 10. TONALITÉ

**Au cours d'un appel** : appuyez sur cette touche pour modifier la tonalité (GRAVE, AIGU, NORMAL).

## 11. TOUCHE ANNULER/SECRET

**En mode Menu principal:** appuyez sur la touche pour revenir à l'écran de veille.

**En mode de sous-menu :** appuyez sur la touche pour retourner au menu précédent.

**En mode modification/pré numérotation :** appuyez sur la touche pour supprimer un caractère/ un chiffre.

**En mode modification/pré numérotation :** maintenez la touche enfoncée pour supprimer tous les caractères/chiffres.

**Au cours d'un appel :** appuyez sur la touche pour désactiver/réactiver le micro.

**Lorsque le téléphone sonne :** appuyez sur la touche pour désactiver la sonnerie du combiné.

**En mode Veille :** appuyez sur la touche pour appeler un autre combiné, la base ou tout par interphone.

## 12. RACCROCHER

**Pendant un appel :** Appuyez pour terminer un appel et revenir à l'écran de veille.

**En mode menu/mode d'édition :** Appuyez pour revenir au menu précédent.

**En mode menu/mode d'édition :** Maintenez enfoncer pour revenir à l'écran de veille.


## 13. PAVÉ ALPHANUMÉRIQUE, ÉTOILE (\*), DIÈSE (#R)

**En mode de pré numérotation ou de modification:** appuyez sur la touche pour insérer un chiffre ou un caractère /\*/#.

**#R au cours d'un appel :** maintenez la touche enfoncée pour faire un flash.

**0 Touche 0 en mode veille/de pré numérotation/modification d'un numéro :** Maintenez la touche enfoncée pour insérer une pause.

## 3.2 Vue d'ensemble de la Base

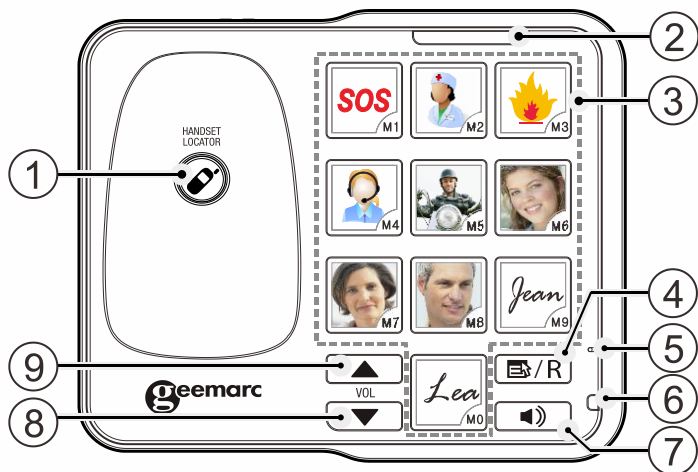

### 1 / RECHERCHE DE COMBINE

Lorsque le téléphone est en veille, appuyez sur la touche pour faire sonner le ou tous les combinés.

### 2. EN LIGNE

**ACTIVÉ** lorsque l'on utilise les combinés ou l'unité de base ou lorsque le système répond à un appel entrant.

**ACTIVÉ** lorsqu'un combiné est en cours d'enregistrement.

### 3. TOUCHES MEMOIRE PHOTO

10 grandes touches mémoire photo ou pour numérotation

### 4. FLASH/ PROGRAMMATION

**En ligne** : Appuyez sur la touche pour faire un Flash.

**En mode veille** : Appuyez sur cette touche pour programmer les touches de mémoire photos.

## 5- MICROPHONE

## 6- INDICATEUR D'ACTIVATION DU MAIN LIBRE

**ACTIVÉ** lorsque le haut-parleur est allumé.

## 7- TOUCHE MAIN LIBRE

**Note** : Attendre 2 secondes avant de composer le numéro de téléphone

## 8- VOL-

**En mode Haut-parleur** : appuyez sur la touche pour diminuer le volume du haut-parleur.

**En mode Veille** : appuyez sur la touche pour diminuer le volume de la sonnerie de l'unité de base.


## 9- VOL ( )

**En mode Haut-parleur** : appuyez sur la touche pour augmenter le volume du haut-parleur.

**En mode Veille** : appuyez sur la touche pour augmenter le volume de la sonnerie de l'unité de base.

### 3.3 Symboles et icônes affichage LCD du combiné

L'affichage à l'écran vous renseigne sur l'état actuel du téléphone.

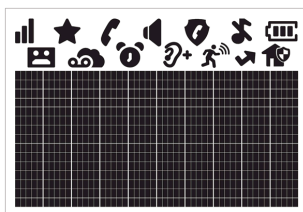

	Indique le niveau de réception. Au maximum quand le signal reçu par la base est bon. Lorsque le combiné est hors de portée de la base ou ne peut pas communiquer avec la base, le symbole disparaît.
	Présent quand un appel est en cours ou un appel interne est en cours. Clignote lorsqu'il y a un appel entrant.
	Présent lorsque le haut-parleur est en fonctionnement.
	Présent quand la batterie est complètement chargée. S'anime lorsque la batterie est en charge.
	Bip et clignote en cas de batterie faible détecté pour indiquer qu'il doit être rechargé.
	Présent lorsque le répondeur téléphonique est activé. Clignote lorsqu'un nouveau message est reçu dans le répondeur.
	Présent lorsqu'une alarme est activée. Clignote lorsque l'alarme programmée est en fonctionnement.
	Présent quand un nouveau Message Vocal en Attente (MVA) reçu n'est pas encore lu. Disparaît lorsque tous les messages vocaux ont été lus.
	Présent quand le mode Numéro bloqué ou sans numéro est activé
	Présent quand la sonnerie est désactivée.
	Présent lorsque la fonction BOOST est activé.
	Présent quand il s'agit d'un nouveau appel (s) dans la liste des appels.

### 3.4 Structure Menu du combiné

En mode veille, en appuyant sur la **TOUCHE GAUCHE** va accéder au menu. Se référer à ce qui suit pour la structure du menu.

Appuyez **TOUCHE GAUCHE** 



JOURNAL	MEM PHOTO	REPERTOIRE	NUM BLOQUE	TRANSFERT
Examiner la Liste d'appels	M1	TOUT	LISTE NOIR	BASE
	M2	MEM DIRECT		COMBINE
	M3	VIP	REGLAGES	TOUT
Sous une entrée sélectionnée de la liste du journal :	M4	Sous un contact :	REGL BLOQ.	
		AJOUTER	SANS NUM	
DETAILS		VOIR		
AJOUT REP		EDITER		
AJOUT BLOQ		EFFACER		
EFFACER		SUPP-TOUT		
SUPP-TOUT		AJOUT VIP		
		AJOUT DIR		
		STATUS		



REGL BASE	REGL COMB	REGL SOS	ALARME	Numvocal	REPONDEUR
SONN BASE	REGL SONN.	NUM SOS	ALARME	MARCHE	LIRE MSG
VOL SONN	REGL TONA.	MSG SOS	DE 1 A 10	ARRET	SUP-TOUT
TPS FLASH	LANGAGE	LANGAGE	M/A		MEMO
1ere SONNE	DATE-HEURE		MELODIE		REP M/A
	ASSOCIER		RENOMMER		REGL REP
	PAR DEFALT		MEMO		LANGAGE
			VOCAL		AFF. ECRAN
			Vous pouvez programmer votre alarme		MESSAGE
			1 FOIS		NB DE
			QUOTIDIEN		SONNERIE
			LUN-VEN		TPS ENREG.
			SAM-DIM		ACCES DIST
					MODIF PIN
					ALERTE MSG

### 3.5 Texte et tableau d'entrée à chiffres

Les tableaux suivants vous indiquent où se trouve chaque caractère de lettre et de ponctuation. Ce sera utile lorsque vous entrez un nom dans l'annuaire téléphonique ou renommer votre combiné

En mode d'édition, un curseur est affiché pour indiquer la position d'entrée texte actuelle. Il est placé à droite du dernier caractère entré.

#### Conseils de rédaction

1. Une fois qu'un caractère est sélectionné, le curseur se déplace vers la position suivante après une courte pause
2. Vous pouvez déplacer le curseur dans le texte par ▲/▼ pour modifier l'entrée de texte.
3. Appuyez sur la **TOUCHE DROITE** (☒) du combiné pour supprimer le dernier caractère.
4. Appuyez et maintenez la TOUCHE DROITE (☒) du combiné pour supprimer la chaîne de texte entier.

#### 3.5.1 Caractères Français

Touche	Édition alphanumérique (Pour le nom du répertoire édition et renommer le combiné)										Numéro d'édition (pour l'édition numéro de téléphone, date / heure édition)	
	Appuyez	1er	2ème	3ème	4ème	5ème	6ème	7ème	8ème	9ème		10ème
1	espace	-	1									1
2	A	B	C	2								2
3	D	E	F	3								3
4	G	H	I	4								4
5	J	K	L	5								5
6	M	N	O	6								6
7	P	Q	R	S	7							7
8	T	U	V	8								8
9	W	X	Y	Z	9							9
0	0											0, P (Pause)
*	*	?	/	\	(	)						*
#	#	'	,	-	.	&						#




## 4. UTILISEZ VOTRE TÉLÉPHONE

### 4.1 Passer un appel externe

#### 4.1.1 Pré numérotation

##### A partir du combiné:


Entrez le numéro de téléphone et appuyez sur  pour composer le numéro. Appuyez sur la **TOUCHE DROITE**  pour effacer l'entrée.

#### 4.1.2 Appel direct

##### A partir du combiné:




Appuyez sur  pour prendre la ligne, puis entrez le numéro de téléphone.

##### A partir de la base/

Appuyez sur  pour prendre la ligne, puis entrez le numéro de téléphone avec les photos.



#### 4.1.3 Appelez à partir du répertoire

##### A partir du combiné:

1. Appuyez sur  ▼ pour accéder au répertoire et appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner l'entrée de répertoire voulu.
2. Appuyez sur  ou  pour composer l'entrée sélectionnée. Appuyez à nouveau pour activer le haut-parleur.

#### 4.1.4 Appelez à partir de la liste d'appels

##### A partir du combiné :







1. Appuyez sur  pour accéder à la liste d'appels. Où suivre la procédure suivante :
  1. Appuyez sur la **TOUCHE GAUCHE**  pour accéder au menu principal.
  2. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner **JOURNAL**.
  3. Appuyez ▲/▼ pour sélectionner l'entrée de liste d'appel souhaitée.
  4. Appuyez  ou  pour composer l'entrée de liste d'appel sélectionné. Appuyez sur  pour activer le haut-parleur si vous avez appuyé dessus avant.

#### 4.1.5 Appel à partir d'une photo de la base

**En mode veille**, appuyez et maintenir la mémoire photo jusque-là LED (6) s'allume sur la base.

## 4.1.6 Appelez à partir de la liste des numéros bis

### A partir du combiné :

1. Appuyez sur  pour accéder à la liste de recomposition.
2. Appuyez sur  /  pour sélectionner le numéro désiré de recomposition.
1. Appuyez sur  pour composer numéro de recomposition sélectionné. Appuyez sur  pour activer le haut-parleur si vous avez appuyé sur  avant.

### 4.1.7 Minuterie d'appel

Votre combiné ou la base compte automatiquement la durée de chaque appel. La minuterie d'appel s'affiche quelques secondes après que l'appel terminé. Elle est affichée au format heures, minutes et secondes (HH :MM : SS).

## 4.2 Répondre à un appel

### A partir du combiné:

Si le combiné n'est pas sur la station de base ou un chargeur :

Quand le téléphone sonne, appuyez   pour répondre à un appel. Appuyez à nouveau pour activer le haut-parleur.




Si le combiné est sur la station de base : Quand le téléphone sonne, décrochez le combiné pour répondre à un appel.

## 4.3 La fonction Volume AMPLIFIÉ

La fonction AMPLIFIÉ vous permet d'amplifier le volume de l'écouteur pour compenser la sensibilité limitée de l'oreille.

### A partir du combiné :

#### Pour activer la fonction MODE AMPLIFIÉ :

- Appuyez sur  à tout moment pendant un appel. "AMPLI M." s'affiche à l'écran.
- Lorsque la fonction AMPLIFIÉ est activée, appuyez sur  /  pour augmenter ou diminuer le volume de l'écouteur.
- Le voyant rouge s'allume en haut du combiné

#### Pour désactiver la fonction mode amplifié et revenir en mode normal :

- Appuyez sur  à nouveau et l'indicateur supérieur du combiné s'éteint.

### REMARQUE :

La fonction mode amplifié se ferme automatiquement lorsque l'appel est terminé.

## 4.4 Terminer un appel

### A partir du combiné:

Pendant un appel, appuyez sur  pour terminer l'appel **OU**  
Remplacez le combiné sur la base pour terminer l'appel.

### A partir de la base :

Appuyez sur  pour terminer l'appel en mode main libre.


## 4.5 Ajuster le Volume de l'écouteur ou du haut-parleur

Il existe 5 niveaux (VOLUME 1 à VOLUME 5) à choisir pour chaque volume écouteur et haut-parleur.

### A partir du combiné : Pendant un appel :

Appuyez sur  pour sélectionner entre VOLUME 1-5. Le réglage actuel est affiché.  
Lorsque vous terminez l'appel, le paramètre restera au dernier niveau sélectionné.

### A partir de la base : Pendant un appel en mode main libre :



Appuyez sur  pour augmenter ou diminuer le volume du main libre.

## 4.6 Mettre un appel en mode secret

Avec le mode secret, vous pouvez parler à quelqu'un à proximité sans laisser l'appelant vous entendre lors d'un appel.

### A partir du combiné :

#### Pendant un appel :




Appuyez sur la **TOUCHE DROITE**  pour couper le micro et « MUET » sera afficher sur l'écran du combiné. Votre interlocuteur ne vous entend pas. Appuyez sur la **TOUCHE DROITE**  pour rallumer le micro.

## 4.7 Reconstitution de l'un des 10 derniers numéros composés

Vous pouvez rappeler jusqu'à 10 des derniers numéros appelés sur le combiné sans fil ou sur la base du téléphone. Si vous avez enregistré un nom dans l'annuaire pour correspondre avec le numéro, le nom sera affiché à la place. Le numéro plus récemment composé s'affiche en haut de la liste de reconstitution.

### 4.7.1 Recomposer un numéro depuis la liste les numéros bis

**A partir du combiné:**





1. En mode veille, appuyez sur  pour accéder à la liste de reconstitution.
2. Appuyez sur  pour parcourir la liste de reconstitution.
3. Appuyez sur  pour recomposer le numéro.

**REMARQUE :**

Si'il n'y a pas de numéro dans la liste des numéros bis, l'afficheur indique « Vide ».




### 4.7.2 Enregistrer un numéro de rappel dans le répertoire

**A partir du combiné:**

1. Suivez les étapes 1 et 2 de la section 4.7.1.
2. Appuyez sur la **TOUCHE GAUCHE**  et choisir **AJOUTER REP.**
3. Appuyez sur la **TOUCHE GAUCHE**  et contrôler le numéro
4. Appuyez sur la **TOUCHE GAUCHE**  et entrée le nom.
5. Appuyez sur la **TOUCHE GAUCHE**  pour sauver.




### 4.7.3 Supprimer un numéro de rappel

**A partir du combiné:**

1. Suivez les étapes 1 et 2 de la section 4.7.1.
2. Appuyez sur la **TOUCHE GAUCHE**  et  pour choisir **EFFACER.**
3. Appuyez sur la **TOUCHE GAUCHE**  pour confirmer.

#### 4.7.4 Supprimer toute la liste de rappel


##### A partir du combiné:




1. Suivez les étapes 1 et 2 de la section 4.7.1.
2. Appuyez sur la **TOUCHE GAUCHE**  et **▲/▼** pour sélectionner **SUPP TOUT**.
3. Appuyez sur la **TOUCHE GAUCHE**  pour confirmer.
4. Appuyez sur la **TOUCHE GAUCHE**  pour reconfirmer.



#### 4.8 Recherche de combiné

Cette fonctionnalité vous aide à trouver votre combiné.

Vous pouvez localiser le combiné de la station de base comme ci-dessous.

- En mode veille, appuyez sur /**HANDSETLOCATOR**.

Tous les combinés enregistrés sur la base vont produire une tonalité, et « RECHERCHE » s'affichera à l'écran. Vous pouvez arrêter la recherche en appuyant  /  /  /

Appuyez sur la **TOUCHE DROITE**  de n'importe quel combiné ou /**HANDSET LOCATOR** sur la base pour arrêter la recherche.

##### REMARQUE :

S'il y a un appel entrant pendant la recherche, le téléphone sonnera avec la mélodie d'appel entrant.

#### 4.9 Effectuer un appel interne

Cette fonctionnalité permet de passer des appels internes, de transférer des appels externes et de faire des appels de conférence. Si le combiné appelé n'a pas répondu dans les 60 secondes, il cesse de sonner.

##### 4.9.1 Intercom

##### A partir du combiné:

1. En mode veille, appuyez sur la **TOUCHE DROITE**  et les numéros des combinés enregistrés seront affichés sauf celui du combiné appelant.
2. Entrez le numéro du combiné à appeler.
3. Le combiné appelé sonne. Appuyez sur   sur le combiné appelé pour faire un appel interne.

##### A partir de la base :

Si vous recevez un appel téléphonique en mode main libre, l'appel sera automatiquement transféré sur le combiné si vous décrochez le combiné de la base.

## 4.9.2 Appeler tous les combinés






### A partir du combiné :

1. En mode veille, appuyez sur la **TOUCHE DROITE**  et les numéros des combinés enregistrés s'afficheront sauf le combiné appelant.
2. Sélectionner **TOUT** pour faire sonner tous les combinés enregistrés.

## 4.9.3 Transférer un appel externe

### A partir du combiné:

#### Pendant un appel externe:


1. Appuyez sur la **TOUCHE GAUCHE**  et  pour sélectionner **TRANSFERT**.
2. Appuyez sur la **TOUCHE GAUCHE**  et sélectionnez le combiné que vous désirez communiquer par interphone.
3. L'appel externe est automatiquement mis en attente et le combiné appelé sonne.
4. Appuyez sur  du combiné appelé pour créer un appel interne.
5. Appuyez sur  du combiné appelant ou remplacez le combiné appelant sur la base pour mettre fin à l'appel en cours avec la partie externe.
6. L'appel externe est transféré vers le combiné appelé.

## 4.9.4 Faire une conférence à 3

La fonctionnalité de téléconférence permet un appel externe partager avec le combiné base à fil et sans fil ou les deux combinés sans fil. Les trois parties peuvent partager la conversation et aucun abonnement réseau n'est nécessaire.

### A partir du combiné :

#### Pendant l'appel externe :

1. Suivez les étapes 1 à 4 de la section 4.9.3.
2. Appuyez et maintenez  sur le combiné appelant pour établir la conférence téléphonique.

### **REMARQUE :**

Toute partie (combiné à cordon base ou sans fil) raccrochant au cours d'une conférence téléphonique laissera l'autre partie présente en communication.

## 5 REPERTOIRE TÉLÉPHONIQUE

Votre téléphone peut mémoriser jusqu'à 50 contacts privés dans le combiné et dans la base avec noms et numéros. Chaque entrée d'annuaire peut avoir un maximum de 20 chiffres pour le numéro de téléphone et de 12 caractères pour le nom. Tous sont stockés dans l'ordre alphabétique.

### 5.1 Ajouter un nouveau contact téléphonique

**A partir du combiné :**


**En veille :**

1. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  , ▲▼ pour sélectionner **REPERTOIRE** et appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour sélectionner **TOUT**.
2. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour sélectionner **AJOUTER**.
3. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et entrez le numéro.
4. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et entrez le nom.
5. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour stocker la nouvelle entrée.

### 5.2 Recherche d'un contact téléphonique

**A partir du combiné :**

**En veille :**

1. Accéder à la liste du répertoire téléphonique en appuyant sur la touche  ▼.
2. Entrez le premier caractère du nom désiré dans le répertoire téléphonique en appuyant plusieurs fois.

### 5.3 Afficher un contact téléphonique

**A partir du combiné:**









**En veille:**

1. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  , ▲▼ pour sélectionner **REPERTOIRE** et appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour sélectionner **TOUT**.
2. Appuyez ▲▼ pour sélectionner l'entrée de répertoire voulu.
3. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲▼ pour sélectionner **VOIR**.
4. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour voir le nom et le numéro du contact.

## 5.4 Modifier un contact téléphonique

A partir du combiné:




En veille:

1. Répéter l'étape 1 du chapitre 5.1 ou appuyez directement sur la touche .
2. Appuyez ▲/▼ pour sélectionner l'entrée de répertoire voulu.
3. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **EDITER**.
4. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et le Numéro du contact s'affiche
5. Modifiez le Numéro avec la **TOUCHE DROITE**  si besoin et appuyez sur la **TOUCHE GAUCHE** .
6. Modifier le Nom avec la **TOUCHE DROITE** , puis appuyez sur la **TOUCHE GAUCHE** .
7. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour confirmer les modifications.

## 5.5 Supprimer un contact téléphonique

A partir du combiné:





En veille:

1. Répéter l'étape 1 du chapitre 5.1 ou appuyez directement sur la touche .
2. Appuyez ▲/▼ pour sélectionner l'entrée de répertoire voulu.
3. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **EFFACER**.
4. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour confirmer.

## 5.6 Supprimez l'Ensemble du Répertoire

A partir du combiné:

En veille:






1. Répéter l'étape 1 du chapitre 5.1 ou appuyez directement sur la touche .
2. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **SUPP TOUT**.
3. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour confirmer.
4. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour reconfirmer.



## 5.7 Place disponible du répertoire

Vous pouvez vérifier le nombre d'entrées utilisé par votre téléphone et la place disponible pour stocker de nouveaux contacts dans votre répertoire téléphonique.

### A partir du combiné:

1. Répéter l'étape 1 du chapitre 5.1 ou directement sur la touche .
2. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et **▲/▼** pour choisir **STATUS**
3. Appuyez **TOUCHE GAUCHE** , l'affichage indique « XX/50 » (XX est le nombre d'entrées dans l'annuaire téléphonique)
4. Appuyez **TOUCHE DROITE**  ou  pour sortir.

## 5.8 Définir les numéros de numérotation rapide

Après avoir réglé les numéros rapides, vous pouvez composer le numéro prédéterminé en restant appuyé sur la touche du chiffre respectif en mode "veille".

### 5.8.1 Ajouter ou modifier le numéro de numérotation rapide






#### A partir du combiné:

1. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et **▲/▼** pour sélectionner **REPERTOIRE**
2. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et utilisez **▲/▼** pour choisir **MEM DIRECT.**
3. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et utilisez **▲/▼** pour sélectionner l'emplacement entre la touche 1 à 9.

S'il n'y a aucun numéro stocké dans la touche sélectionnée :

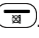


4. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et sélectionner **AJOUTER**
5. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et entrer le numéro de téléphone.
6. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et entrer le nom
7. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour sauvegarder

Ou s'il existe déjà un certain nombre stocké dans la touche sélectionnée :

4. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et sélectionner **EDITER** avec **▲/▼**
5. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et modifier le numéro téléphonique avec la **TOUCHE DROITE** .
6. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et modifier le Nom à l'aide de la **TOUCHE DROITE** .
7. Appuyez **TOUCHE GAUCHE** pour sauvegarder

### 5.8.2 Supprimer un numéro de numérotation rapide

#### A partir du combiné:

1. Répétez les étapes 1 à 3 dans la section 5.8.1.
2. Appuyez **▲/▼** pour sélectionner un contact téléphonique.
3. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et **▲/▼** pour choisir **EFFACER** ou **SUPP TOUT** et Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour confirmer
4. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour valider.

## 5.9 Définir les numéros VIP







Après avoir entré les numéros VIP, vous pouvez rechercher votre numéro important directement dans le répertoire VIP pour avoir une meilleur visibilité".

### 5.9.1 Ajouter ou modifier le numéro de numérotation rapide

A partir du combiné:




1. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **JOURNAL**.
2. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et utilisez▲/▼ pour sélectionner **REPertoire**
3. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **JOURNAL**.
4. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour choisir **TOUT**.
5. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et utilisez ▲/▼ pour sélectionner un contact de l'annuaire.
6. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et utilisez▲/▼ pour sélectionner **AJOUT VIP**
7. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour valider.

### 5.9.2. Voir un numéro VIP

1. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **REPertoire**
2. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et utilisez ▲/▼ pour choisir **VIP**.
3. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour choisir le numéro VIP
4. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour voir le numéro de téléphone ainsi que le NOM.
5. Appuyez **TOUCHE DROITE**  ou  pour sortir.





### 5.9.3. Supprimer un numéro ou tous les VIP

A partir du combiné:

1. Répétez les étapes 1 à 3 dans la section 5.9.2.
2. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour choisir **EFFACER** ou **SUPP TOUT**.
3. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour confirmer
4. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour valider

### 5.9.4 Etat du mode VIP

A partir du combiné:

1. Répétez les étapes 1 à 3 dans la section 5.9.2.
2. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour choisir **STATUS**
3. Appuyez **TOUCHE GAUCHE** , l'affichage indique « XX/50 » (XX est le nombre d'entrées dans l'annuaire téléphonique VIP)
4. Appuyez **TOUCHE DROITE**  ou  pour sortir.

## 6. AFFICHAGE DE L'APPELANT (DÉPEND DU RÉSEAU)

Cette fonctionnalité est disponible si vous avez souscrit au service « Identification de l'appelant » avec votre fournisseur. Votre téléphone peut mémoriser jusqu'à 20 appels reçus sur le combiné avec les informations de date/heure dans la liste d'appels du téléphone. Le numéro s'affichera sur l'écran LCD lorsque le téléphone sonne. Si le numéro correspond avec l'une des entrées de l'annuaire privé, enregistré dans le Répertoire privé le nom de l'appelant sera affiché avec le numéro. Le téléphone sonnera avec la mélodie associée à cette entrée d'annuaire.

Si le numéro de l'appelant est désactivé pour envoyer des informations sur l'appelant, « INDISPONIBLE » s'affichera.

Si l'appel est un appel international ou avec un nombre inconnu, « hors zone » s'affichera.

En mode veille, si les trois derniers appels sont reçus, « 3 NV APPEL » seront affichés.





### 6.1 Afficher la liste des appels manqués

Les appels manqués sont enregistrés dans le journal avec le tout dernier appel en haut de la liste. Lorsque la liste d'appels est pleine, l'appel le plus ancien sera remplacé automatiquement. L'appel manqué est marqué avec l'icone ★

**A partir du combiné :**





1. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲▼ pour sélectionner **JOURNAL**.
2. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲▼ pour faire défiler la liste des appels manqués

### 6.2 Détail d'un appel manqué

1. Suivez la Section 6.1 pour accéder à la liste des appels manqués.
2. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲▼ pour sélectionner **DETAILS**
3. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour voir la date et l'heure de l'appel
4. Appuyez **TOUCHE DROITE**  ou  pour sortir.

### 6.3 Enregistrer un numéro d'appel manqué dans le répertoire





**A partir du combiné:**

1. Suivez la Section 6.1 pour accéder à la liste des appels manqués.
2. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲▼ pour sélectionner **AJOUT REP**.
3. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et le numéro de l'appel manqué s'affiche.
4. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et entrez le NOM
5. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour sauvegarder.

## 6.4 Mettre un appel manqué en liste noire




Si vous souhaitez bloquer un numéro de téléphone, suivre la procédure suivante pour le placer en liste noire

**A partir du combiné:**

1. Suivez la Section 6.1 pour accéder à la liste des appels manqués.
2. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et **▲▼** pour sélectionner **AJOUT BLOQ.**
3. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et le numéro de l'appel manqué s'affiche.
4. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et entrez le NOM
5. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour sauvegarder.




## 6.5 Supprimer un appel manqué dans le journal

**A partir du combiné:**

1. Suivez la Section 6.1 pour accéder à la liste des appels manqués.
2. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et **▲▼** pour sélectionner **EFFACER.**
3. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour confirmer.
4. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour valider.

## 6.6 Supprimer toute la liste des appels manqués

**A partir du combiné:**

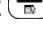

1. Suivez la Section 6.1 pour accéder à la liste des appels manqués.
2. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et **▲▼** pour sélectionner **SUPP TOUT.**
3. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour confirmer.
4. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour valider.

# 7 TOUCHES MEMOIRES PHOTOS







## 7.1 Enregistrement d'une mémoire photo

### A partir de la base

Vous avez la possibilité de programmer 10 touches mémoires photos.

**En mode veille** : Appuyez sur , entrez votre numéro de téléphone en utilisant les touches photos de la base (par exemple M0 pour le chiffre 0), appuyez sur  et appuyez sur la photo que vous avez choisie.



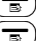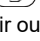


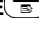


### A partir du combiné :

1. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et **▲/▼** pour sélectionner **MEM PHOTO**.
2. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et choisir la touche photo avec **▲/▼** .
3. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et choisir **AJOUTER** ou **EDITER** si numéro.
4. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et entrez le numéro.
5. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et entrez le nom.
6. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour sauver.

Vous avez la possibilité aussi de voir ou effacer un contact d'une mémoire photo en choisissant au point 3 **VOIR** ou **EFFACER**.

## 7.2 Enregistrement d'un nom vocal

Vous avez la possibilité de mettre un nom vocal à votre mémoire photo.



1. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et **▲/▼** pour sélectionner **MEM PHOTO**.
2. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et choisir la touche photo avec **▲/▼** .
3. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et choisir **NOM VOCAL**.
4. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et choisir **ENREG** avec **▲/▼** .
5. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et entrez le nom puis **TOUCHE GAUCHE** .
6. Appuyez **TOUCHE DROITE**  ou  pour sortir.

Lorsque vous recevrez un appel téléphonique ou le contact possède un nom vocal, celui-ci pourra être entendu sur la base ainsi que dans le combiné.

Vous avez aussi la possibilité de supprimer ou d'écouter le nom vocal en choisissant au point 3 **ECOUTER** ou **EFFACER**.

**REMARQUE** : Pour utiliser une touche mémoire photo, en mode veille, appuyez et maintenir la mémoire photo jusque-là LED (6) s'allume sur la base.

Si vous souhaitez passer l'appel de la base au combiné, retirez le combiné de la base Pour transférer l'appel automatiquement.

Si le combiné n'est pas placé sur la base, appuyez sur la touche  pour prendre la ligne et appuyez ensuite sur le bouton  de la base pour la raccrocher.





## 8. REGLAGES DU TÉLÉPHONE

Votre téléphone est livré avec une sélection de paramètres que vous pouvez modifier pour personnaliser votre téléphone comme vous le voulez.

### 8.1 Réglages du combiné

#### 8.1.1 Définir la mélodie de sonnerie pour les appels internes

Vous pouvez définir une mélodie spéciale pour personnaliser votre sonnerie interne. Un total de 10 mélodies est disponible pour votre choix.

1. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **REGL COMB**.
2. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour choisir **REGL SONN.**
3. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner la **SONN INT.**
4. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner la sonnerie désirée pour les appels internes.





#### **REMARQUE :**

La mélodie respective se jouera pendant que vous parcourez la liste de la mélodie.

5. Appuyez **TOUCHE GAUCHE** pour confirmer.

#### 8.1.2 Régler la sonnerie pour les appels externes

Vous pouvez définir une mélodie spéciale pour personnaliser votre sonnerie externe. Un total de 10 mélodies est disponible pour votre choix.

1. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **REGL COMB**.
2. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour choisir **REGL SONN.**
3. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **SONN EXT.**
4. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner la sonnerie désirée pour les appels externes.

#### **REMARQUE :**

La mélodie respective se jouera pendant que vous parcourez la liste de la mélodie.



5. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour confirmer.

### 8.1.3 Régler le Volume de la sonnerie

Vous pouvez définir le volume de la sonnerie. Un total de 6 niveaux de volume de sonnerie y compris VOLUME OFF est disponible.




1. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **REGL COMB.**
2. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour choisir **REGL SONN.**
3. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **VOL SONN**
4. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner le volume de la sonnerie désirée.

#### REMARQUE:

- Le volume de sonnerie sélectionné se jouera au cours de votre choix.
  - Si ARRET est sélectionné,  s'affichera sur l'écran du combiné.
5. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour confirmer.

### 8.1.4 Définir la Tonalités d'alerte

Un bip est émis lorsque vous appuyez sur une touche. Vous pouvez activer ou désactiver la tonalité des touches. Vous pouvez également activer l'alerte quand la batterie est faible et hors de portée. Signal de batterie faible retentit pendant que vous parlez au téléphone pour vous avertir que vous devez recharger votre batterie

1. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **REGL COMB.**
2. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour choisir **REGL TONA.**
3. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **BIP TOUCHE/ BATT FAIBLE / HORS PORTEE.**
4. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **MARCHE** ou **ARRET.**
5. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour confirmer.

### 8.1.5 Définir la langue du combiné

Vous pouvez choisir la langue à afficher sur l'écran du combiné sur un total de 7 langues (Anglais, Français, Allemand, Néerlandais, Italien, Espagnol et Portugais).




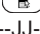
1. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **REGL COMB.**
2. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour choisir **LANGAGE.**
3. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner la langue souhaitée.
4. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour confirmer.

## 8.1.6 Paramètres de l'horloge

Vous aurez besoin de définir la date et l'heure afin que vous sachiez quand vous avez reçu des messages sur le répondeur ou des appels.

### A partir du combiné :






#### 8.1.6.1 Définir le format de Date

1. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **REGL COMB**
2. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **DATE-HEURE**.
3. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour afficher **FORME DATE**.
4. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour choisir votre format de date souhaité (JJ--MM--AA ou MM--JJ--AA).
5. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour confirmer.

#### 8.1.6.2 Définir le format de l'heure

1. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **REGL COMB**
2. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **DATE-HEURE**.
3. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **FORME HEUR**.
4. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour choisir votre format de l'heure désirée (12h ou 24h).
5. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour confirmer.

#### 8.1.6.3 Régler l'heure et la date

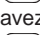1. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **REGL COMB**
2. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **DATE-HEURE**.
3. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **REGL DATE**.
4. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et entrez la date à l'aide des chiffres. La date entrée sera dans le format que vous avez défini dans la section 8.1.6.1.
5. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et entrez l'heure à l'aide des chiffres. L'heure entrée sera dans le format que vous avez défini dans la section 8.1.6.2

### **REMARQUE :**

Si l'heure est déjà mise, l'heure actuelle s'affiche, dans le cas contraire, « HH--MM » s'affichera.

Si la date est déjà mise, la date du jour s'affiche, dans le cas contraire, « JJ--MM--AA » s'affichera.



## 8.1.7 Enregistrement d'un combiné supplémentaire

Votre combiné et la station de base sont préenregistrés. Jusqu'à cinq combinés peuvent être enregistrés à une station de base.

### Combiné sans fil:

1. Maintenez enfoncée 5 secondes la touche **HANDSET LOCATOR** sur la base pour passer en mode enregistrement, relachez la touche après le bip.
2. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **REGL COMB.**
3. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour choisir **ASSOCIER.**
4. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et l'affichage indiquera « APPAIRAGE ».

Après un court délai, si l'enregistrement est réussi, il y aura un bip de confirmation, et l'écran du combiné retournera au mode "veille" avec le nouveau numéro du combiné. L'affichage de base revient aussi en mode "veille".

## 8.1.8 Initialisation du combine

Vous pouvez initialiser votre combiné, après la remise à zéro, tous les réglages personnels et le journal d'appel seront effacés mais pas votre annuaire

1. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **REGL COMB.**
2. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour choisir **PAR DEFAUT**
3. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour confirmer

## 8.2 Réglages de la base en utilisant le combiné

### A partir du combiné :





#### 8.2.1 Régler la mélodie de sonnerie

Vous pouvez définir une mélodie spéciale pour personnaliser votre sonnerie externe. Un total de 5 mélodies sont disponibles.

1. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et sélectionnez **▼/▲ REGL BASE**.
2. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et sélectionnez **▼/▲ SONN BASE**.
3. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et sélectionnez **▼/▲** la mélodie de la sonnerie désirée.
4. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour confirmer.

#### 8.2.2 Régler le volume de sonnerie

Vous pouvez définir le volume de la sonnerie. Un total de 6 niveaux de volume de sonnerie y compris VOLUME OFF est disponible.

1. Appuyez **touche gauche**  et **▼/▲** pour sélectionnez **REGL BASE**.
2. Appuyez **touche gauche**  et **▼/▲** pour sélectionnez **VOL SONN**.
3. Appuyez **touche gauche**  et **▼/▲** pour sélectionnez le volume de la sonnerie désirée.
4. Appuyez **touche gauche**  pour confirmer.

#### 8.2.3 Régler le temps du Flash

Le temps du flash par défaut est idéal pour votre opérateur de réseau et votre pays. C'est peu probable que vous devez modifier ce paramètre.

1. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et **▲/▼** pour sélectionner **REGL BASE**
2. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et **▲/▼** pour sélectionner le **TPS FLASH**.
3. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et **▲/▼** pour choisir votre temps flash désiré (**COURT**= 100 MS, **MOYEN** = 300MS(France), **LONG** = 600 MS).
4. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour confirmer.

#### 8.2.4 Retirer la première sonnerie

Certaines fois, votre base et combiné sonne 1 seule fois. Il s'agit de la notification ou dénotification de votre ligne téléphonique pour la messagerie vocale. Pour éviter cela, activer la fonction 1ère sonnerie




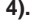



1. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et **▲/▼** pour sélectionner **REGL BASE**
2. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et **▲/▼** pour sélectionner **1ere SONN**.
3. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et choisir **MARCHE** ou **ARRET**
4. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour confirmer

# 9. APPEL SOS

## 9.1 Réglages SOS

Vous devez définir les numéros SOS avant de pouvoir faire des appels d'urgence SOS en utilisant le combiné.

**A partir du combiné :**

1. Appuyez sur la **touche gauche**  et ▲/▼ pour sélectionner **REGL SOS**.
2. Appuyez sur la **touche de gauche**  pour afficher **NUM SOS**.
3. Appuyez sur la **touche gauche**  et ▲/▼ pour sélectionner le numéro SOS à éditer (**SOS 1, SOS 2, SOS 3 ou SOS 4**).
4. Appuyez sur la **touche gauche**  et choisir **AJOUTER** ou **EDITER** si déjà un numéro
5. Appuyez sur la **touche gauche**  et entrez le numéro
6. Appuyez sur la **touche gauche**  et entrez le nom
7. Appuyez sur la **touche gauche**  pour confirmer

## 9.2 Faire un appel d'urgence SOS

**A partir du combiné :**

Appuyez et maintenez la **touche SOS** du combiné pour entrer dans la séquence d'appel d'urgence du numéro **SOS 1** vers le numéro **SOS 4**. Un appel sera tout d'abord composé au numéro **SOS 1**. Si le numéro **SOS 1** ne répond pas dans les 60 secondes, l'appel sera fait au numéro **SOS 2** et ainsi de suite

**Remarque :** L'autre partie, lors de la réception de message SOS, doit valider l'appel en appuyant sur une touche de son clavier. Puis toutes les 2 min, il faut revalider pour poursuivre la conversation.






## 9.3 Sélection du langage pour le message SOS

1. Appuyez sur la **touche gauche**  et ▲/▼ pour choisir **REGL SOS**.
2. Appuyez sur la **touche gauche**  et ▲/▼ pour choisir **LANGAGE**. Choisir votre langage parmi les 4 (Français, Allemand, Néerlandais ou Anglais)
3. Appuyez sur la **touche gauche**  pour enregistrer votre langage SOS

## 9.4 Enregistrement du Message SOS






Vous pouvez enregistrer votre message personnalisé SOS lorsque vous composez un appel d'urgence SOS.

**A partir du combiné :**

1. Appuyez sur la **touche gauche**  et ▲/▼ pour choisir **REGL SOS**.
2. Appuyez sur la **touche gauche**  et ▲/▼ pour choisir **MSG SOS**.
3. Appuyez sur la **touche gauche**  et ▲/▼ pour sélectionner **ENREG**.
4. Appuyez sur la **touche gauche**  et commencer votre message après le bip sonore et le mot « Enregistrement » s'affiche.
5. Appuyez sur la **touche gauche**  pour enregistrer votre message SOS.

## 9.5 Écouter le Message SOS

**A partir du combiné :**

1. Appuyez sur la **touche gauche**  et ▲/▼ pour choisir **REGL SOS**.
2. Appuyez sur la **touche gauche**  et ▲/▼ pour sélectionner **MSG SOS**.
3. Appuyez sur la **touche gauche**  pour choisir **ECOUTER**.
4. Appuyez sur la **touche gauche**  pour démarrer la lecture du message SOS.
5. Appuyez sur la **touche gauche**  pour arrêter la lecture du message SOS.



## 9.6 Effacer le message SOS

**A partir du combiné :**



1. Appuyez sur la **touche gauche**  et ▲/▼ pour choisir **REGL SOS**.
2. Appuyez sur la **touche gauche**  et ▲/▼ pour sélectionner **MSG SOS**.
3. Appuyez sur la **touche gauche**  pour choisir **EFFACER**.
4. Appuyez sur la **touche gauche**  pour valider.

# 10 Fonction alarme




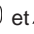






Vous pouvez utiliser ce téléphone comme alarme. Vous avez la possibilité d'en programmer

10. Lorsqu'une alarme est définie,  s'affiche à l'écran. Lorsque l'heure de l'alarme est atteinte  et « l'Alarme 1 », s'affichent, la sonnerie commence pour une durée de 45 secondes. Vous pouvez appuyer sur n'importe quelle touche pour désactiver l'alarme.




## REMARQUES:

- a. Le niveau du volume est le même que les paramètres de volume de sonnerie. Si la sonnerie est définie sur **ARRET**, l'alarme sonne au **VOLUME 1**.
- b. Pendant un appel externe ou un appel interne, si une alarme est définie, et lorsque l'heure de l'alarme est atteinte,  et « 'ALARME 1 » s'affiche. Une tonalité retentit dans l'écouteur pour avertir l'utilisateur, l'heure de l'alarme est atteinte. Une fois que l'utilisateur appuie sur une touche ou sur , cela désactive l'alarme, il revient à l'écran de veille.
- c. Lors de la pagination et la sonnerie, l'alarme ne se déclenche pas lorsque l'heure de réveil programmée.





### 10.1 Activer/désactiver l'alarme

1. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et  pour sélectionner **REG ALARME**.
2. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et  pour sélectionner le numéro de l'alarme.
3. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et choisir **M/A**.
4. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et choisir **MARCHE**
5. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et entrer l'heure à l'aide du clavier
6. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et choisir la fréquence (**1 FOIS, QUOTIDIEN, LUN- VEN, SAM- DIM**)
7. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour sauver et  s'affiche

### 10.2 Renommer le nom d'une alarme





1. Suivez les étapes 1 à 2 à l'article 10.1.
2. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et choisir **RENOMMER** avec .
3. Appuyez **TOUCHE DROITE**  pour effacer un caractère et entrer ensuite le nouveau nom.
4. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour confirmer.

### 10.3 Régler la mélodie de sonnerie

- 1 Suivez les étapes 1 à 2 à l'article 10.1.
- 2 Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et choisir **MELODIE** avec .
- 3 Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et  pour sélectionner la mélodie
- 4 Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour confirmer.

## 10.4 Enregistrement d'un mémo vocal pour une alarme

Si vous enregistrez un message vocal, celui-ci sera lu à la place de la sonnerie

- 1 Suivez les étapes 1 à 2 à l'article 10.1.
- 2 Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et choisir **MEMO VOCAL** avec ▲ ▼
- 3 Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **ENREG**
- 4 Appuyez **TOUCHE GAUCHE** , après le bip, dicter votre message.
- 5 Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour arrêter l'enregistrement
- 6 Le message enregistré est lu.




## 10.5 Ecouter un message vocal d'une alarme

Si vous avez enregistré un message vocal, vous avez la possibilité d'aller le contrôler

1. Suivez les étapes 1 à 2 à l'article 10.1.
2. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et choisir **MEMO VOCAL** avec ▲ ▼
3. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **ECOUTER**
4. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour confirmer.

## 10.6 Effacer un message vocal

Si vous avez un message vocal pour une alarme, vous pouvez l'effacer en suivant la procédure suivante

- 1 Suivez les étapes 1 à 2 à l'article 10.1.
- 2 Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et choisir **MEMO VOCAL** avec ▲ ▼
- 3 Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **EFFACER**
- 4 Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour confirmer.

# 11. FONCTION AIDE VOCALE

L AD595 est capable de vous lire le chiffre composé sur le clavier ou le numéro de téléphone reçu si service présentation du numéro.

1. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **NUM VOCALE**.
2. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **MARCHE** ou **ARRET**.
3. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour valider votre choix

# 12 FONCTION RÉPONDEUR

Votre base téléphonique comprend un répondeur téléphonique qui enregistre les appels sans réponse lorsqu'il est activé. Le répondeur peut stocker jusqu'à 59 messages avec un délai d'enregistrement maximal d'environ 25 minutes. Ainsi que l'enregistrement des messages entrants, vous pouvez enregistrer des mémos pour d'autres utilisateurs.

## 12.1 Mise en marche/arrêt du répondeur




A partir du combiné :

1. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **REPONDEUR**
2. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **REP M/A**.
3. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **MARCHE** ou **ARRET**
4. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour confirmer.

## 12.2 Écouter les Messages du Répondeur


Si vous avez de nouveaux messages, l'écran affiche par exemple « 1 NOUVEAU MESSAGE », ce qui signifie que vous avez 1 nouveau message. Le nouveau message est enclenché en premier et puis ceux qui sont enregistrés.

A partir du combiné :

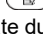1. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **REPONDEUR**
2. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour afficher **LIRE MSG**.
3. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  encore une fois pour lancer le message la lecture et l'écran affiche la date du message reçu.
4. Pendant la lecture du message, appuyez sur ▲/▼ pour régler le volume de lecture de message respectivement.

REMARQUE :

Après que le nouveau message est lu, le message sera enregistré comme un ancien message automatiquement sauf s'il est supprimé.

5. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **PRECEDENT STOP, SUIVANT**, ou **SUPPRIMER** pour effectuer les tâches suivantes pendant la lecture du message.

•**ARRÊT** : Arrêter l'écoute du message actuel et revenir à la ANS. Menu de la machine.

•**AVANT** : Passer pour écouter le message suivant L'indication de la date du message suivant s'affiche s'il y a le message suivant.

•**PRECEDENT** : Passer pour répéter la lecture du message en cours depuis le début. L'indication de la date du message en cours s'affiche.

•**SUPPRIMER** : Le message actuel et le prochain message sera enclenché.

6. Appuyez **TOUCHE GAUCHE** pour confirmer.





### REMARQUE :

Alternativement, vous pouvez utiliser les touches de raccourci suivantes pour contrôler les différentes opérations pendant la lecture du message.

- Appuyez sur **5** pour arrêter la lecture du message
- Appuyez sur **4** pour répéter la lecture du message en cours depuis le début.
- Appuyez sur **4** deux fois pour sauter en arrière au message précédent.
- Appuyez sur **6** pour écouter le message suivant.
- Appuyez sur **2** pour supprimer le message en cours d'écoute.
- Appuyez sur **▲/▼** pour régler le volume de lecture.

## 12.3 Supprimer tous les Messages du répondeur

A partir du combiné:

1. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et **▲/▼** pour sélectionner **REPONDEUR**
2. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et **▲/▼** pour sélectionner **SUP TOUT**.
3. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour valider.
4. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour confirmer la suppression de tous les anciens messages





### REMARQUE :

Vous ne pouvez pas supprimer les nouveaux messages, avant leurs lectures.


## 12.4 Enregistrement d'un MEMO

Vous pouvez enregistrer votre message mémo pour un autre utilisateur. Lorsque vous enregistrez un mémo, le compteur de message passera par l'un des messages pour être enclenché de la même manière que le message du TAM. L'enregistrement de MEMO peut encore fonctionner même lorsque le répondeur est désactivé.

A partir du combiné:

1. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et **▲/▼** pour sélectionner **REPONDEUR**
2. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et **▲/▼** pour sélectionner **MEMO**.
3. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour démarrer l'enregistrement du mémo après le bip et « Enregistrement » s'affiche.
4. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour arrêter l'enregistrement et enregistrer ce mémo.

**OU**

Appuyez **touche droite**  pour arrêter l'enregistrement de memo sans enregistrer les modifications et retourner au menu du répondeur.



## 12.5 Réglages du répondeur

### 12.5.1 Enregistrer votre annonce







Vous pouvez enregistrer votre propre annonce. Lorsque vous en enregistrez une, elle servira quand le répondeur prend l'appel. Si votre annonce personnalisée est supprimée, l'annonce par défaut est restaurée automatiquement.

#### A partir du combiné:

1. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **REPONDEUR**
2. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour **REGL REP.**
3. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **MESSAGE**
4. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour choisir **ENREG.**
5. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour démarrer l'enregistrement de votre annonce personnalisés et « ENREG » s'affiche sur l'écran.
6. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour arrêter et sauvegarder votre annonce personnalisée. Votre annonce nouvellement enregistré s'enclenchera automatiquement. Alternativement, appuyez **TOUCHE DROITE**  pour retourner à l'écran précédent sans enregistrer l'annonce personnalisée.

### 12.5.2 Lecture du Message sortant (OGM)

#### A partir du combiné:



1. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **REPONDEUR.**
2. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour **REGL REP.**
3. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **MESSAGE**
4. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour choisir **ECOUTER.**
5. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour écouter votre annonce personnalisée (si vous avez enregistré une annonce personnalisée avant).
6. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour arrêter la lecture de l'annonce et revenir au menu précédent.

#### REMARQUE :

Si une annonce personnalisée n'est pas enregistrée avant, l'annonce par défaut s'enclenchera.

### 12.5.3 Supprimer une annonce personnalisée

#### A partir du combiné:

1. Répétez les étapes 1 à 3 dans la section 12.5.2.
2. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour choisir **EFFACER**.
3. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et « ANNONCE PAR DEFAUT » s'affiche  
Remarque :  
L'annonce par défaut sera remise automatiquement

### 12.5.4 Définir le nombre de sonnerie avant décrochage

Vous pouvez définir le nombre de sonneries avant que le répondeur se déclenche et commence la lecture de votre annonce. Vous pouvez régler le répondeur pour répondre après deux à dix sonneries ou MODE ECO.

La fonction de «MODE ECO» répond aux appels après la 6<sup>ème</sup> sonnerie, jusqu'au premier message enregistré, puis le répondeur répond après environ 2 sonneries. Ceci est utile lorsque vous utilisez l'accès à distance.

#### A partir du combiné :

1. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **REPONDEUR**
2. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour **REGL REP.**
3. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour **NB SONNERI**
4. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner le temps de réponse (**2 SONNERIES, 4 SONNERIES, 6 SONNERIES, 8 SONNERIES, MODE ECO, 10 SONNERIES**).
5. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour confirmer.

### 12.5.5 Définir la durée d'enregistrement du Message entrant






Vous pouvez définir la longueur maximale du temps d'enregistrement des messages.

#### A partir du combiné:

1. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **REPONDEUR**
2. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour **REGL REP.**
3. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **TPS ENREG.**
4. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour choisir le temps d'enregistrement désiré (Options disponibles : **60s, 120s, 180s ou illimité**).
5. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour confirmer.

## 12.5.6 Définir la langue du Répondeur

Vous pouvez choisir la langue du message du répondeur sur un total de 4 langues (ANGLAIS, FRANÇAIS, NEERLANDAIS et ALLEMAND).

1. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **REPONDEUR**
2. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **REGL REP.**
3. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **LANGAGE.**
4. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner la langue désirée du message pour le répondeur.
5. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour confirmer.

## 12.5.7 Activer ou désactiver l'écoute pendant l'enregistrement

Vous pouvez choisir d'activer ou de désactiver le filtrage des appels de base. Lorsque le répondeur est en marche, et lorsqu'il y a un message entrant, la base va jouer le message à travers le haut-parleur pendant l'enregistrement

### A partir du combiné:

1. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **REPONDEUR**
2. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour **REGL REP.**
3. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **AFF ECRAN.**
4. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **MARCHE** ou **ARRET.**
5. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour confirmer.

## 12.5.8 Activer l'accès à distance

Votre téléphone vous permet d'écouter vos messages, ou d'utiliser votre répondeur, en appelant le répondeur lorsque vous êtes loin de chez vous en saisissant un code PIN à 4 chiffres sur un autre téléphone. Utilisez le code PIN à 4 chiffres pour empêcher d'autres personnes d'avoir accès à votre répondeur.






### 12.5.8.1 Modifier le code PIN à 4 chiffres de l'accès à distance

#### A partir du combiné:

1. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **REPONDEUR**
2. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **REGL REP.**
3. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **MODIF PIN.**
4. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et composer votre nouveau code pin
5. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour valider






### 12.5.8.2 Activer ou désactiver l'accès à distance

A partir du combiné:

1. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **REPONDEUR**
2. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **REGL REP.**
3. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour choisir **ACCES DIST.**
4. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **MARCHE** ou **ARRET** pour activer ou désactiver l'accès à distance.
5. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour confirmer.

### 12.5.8.3 Bip d'alerte nouveau message

Cette fonction vous permet d'entendre un bip provenant de votre téléphone si vous avez un nouveau message.

1. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **REPONDEUR**
2. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **REGL REP.**
3. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour choisir **ALERTE MSG.**
4. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **MARCHE** ou **ARRET** pour activer ou désactiver la fonction alerte nouveau message
5. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour confirmer.

#### 12.5.8.4 Opérations à distance

Si vous êtes loin de votre maison, vous pouvez appeler votre répondeur pour activer ou désactiver le répondeur automatique et écouter vos messages à distance en utilisant un autre téléphone

1. Passez un appel depuis un autre téléphone.
2. Lorsque le répondeur répond à l'appel et commence l'annonce, appuyer sur ✕
3. Entrez le code PIN à 4 chiffres (code PIN par défaut est 0000).
4. Appuyez sur les touches suivantes pour mener à bien vos changements.

Touches	Fonction	
	Pendant que le message n'est pas en marche	Pendant que le message est en marche
2		Supprimer le message actuel
4		Répétez le message en cours depuis le début. Appuyez deux fois pour passer au message précédent.
5	Lire le message	Mettre la lecture du message actuel en pause. Réappuyez sur la touche pour reprendre la lecture au début de ce message.
6		Passer au message suivant
7	Activer le répondeur	
9	Désactiver le répondeur	
*	Entrer le code PIN à 4 chiffres	

#### REMARQUE:

- Lorsque la mémoire de votre répondeur est pleine, le mode de réponse va changer de réponse automatiquement. Il va changer en mode REPONDEUR SIMPLE automatiquement après que quelques messages ont été supprimés, il revient en mode répondeur enregistreur.

## 13 DÉPANNAGE

Si vous avez des difficultés avec votre téléphone, essayez les suggestions ci-dessous.

Problème	Solutions
<b>Mon téléphone ne fonctionne plus du tout.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Assurez-vous que la batterie est installée et chargée correctement.</li><li>• Pour une performance optimale quotidienne, remplacez-le combiné filaire du téléphone sur sa base</li><li>• Assurez-vous que l'adaptateur d'alimentation est bien branché dans une prise non contrôlée par un interrupteur mural.</li><li>• Assurez-vous que le cordon téléphonique est fermement branché sur la base téléphonique et à la prise téléphonique murale.</li><li>• Débranchez l'alimentation électrique de la base du téléphone. Attendez environ 15 secondes, puis rebranchez-la. Attendez jusqu'à une minute pour que le combiné et la base téléphonique se synchronise.</li><li>• Retirez et réinsérez la batterie. Si cela ne fonctionne toujours pas, il peut être nécessaire d'acheter une nouvelle batterie.</li><li>• Débrancher la prise téléphonique murale de la base du téléphone et branchez un téléphone qui fonctionne. Si l'autre téléphone ne fonctionne pas, le problème est probablement dû au câblage ou au service téléphonique. Appelez votre fournisseur de service téléphonique.</li></ul>
<b>Symbole batterie faible montré à l'écran.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Placez le combiné du téléphone base pour recharger.</li><li>• Retirez et réinstallez les batteries et utilisez-les jusqu'à ce qu'elles soient complètement épuisées, puis recharger le combiné sur la base du téléphone.</li><li>• Si les mesures ci-dessus ne résolvent pas le problème, remplacez les batteries.</li></ul>
<b>Les batteries ne se chargent pas dans le combiné ou les batteries du combiné n'acceptent pas la charge.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Assurez-vous que le combiné est placé correctement sur la base.</li><li>• Retirez et réinstallez les batteries, puis chargez jusqu'à 16 heures.</li><li>• Acheter des nouvelles batteries.</li></ul>

**Il y a interférence lors d'une conversation téléphonique. Mes appels disparaissent lorsque j'utilise le combiné.**

- Le combiné peut être hors de portée. Déplacer le plus près de la base du téléphone.
- Si vous êtes abonné au service Internet haute vitesse (ligne d'abonné numérique - LAN) par le biais de votre ligne téléphonique, vous devez installer un filtre ADSL entre la base du téléphone et la prise téléphonique murale. Le filtre empêche les problèmes de bruits et d'identification de l'appelant causés par des interférences de l'ADSL. Pour plus d'informations sur les filtres ADSL, veuillez contacter votre fournisseur de services internet.
- Les appareils ou autres téléphones sans fil branchés sur le même circuit que la base du téléphone peuvent provoquer des interférences
- Essayez de déplacer l'appareil ou la base du téléphone vers une autre prise.
- D'autres produits électroniques peuvent provoquer des interférences sur votre téléphone sans fil. Installer votre téléphone aussi loin que possible des dispositifs électroniques suivants : routeurs sans fil, radios, pylônes radio, tours de téléavertisseur, téléphones cellulaires, téléphones numériques, interphones, salle moniteurs, téléviseurs, magnétoscopes, ordinateurs personnels, appareils de cuisine et autres téléphones sans fil.
- Si votre téléphone est connecté à un modem ou d'un parasurtenseur, branchez le téléphone (ou le modem/parasurtenseur) à un emplacement différent. Si cela ne résout pas le problème, relocaliser votre téléphone ou un modem plus loin indépendamment de l'autre, ou utilisez un parasurtenseur différents.
- L'emplacement de votre base de téléphone peut affecter les performances de votre téléphone sans fil. Pour une meilleure réception, installer la base du téléphone dans un emplacement centralisé au sein de votre maison ou au bureau, des murs ou autres obstacles. Dans de nombreux environnements, élever la base du téléphone améliore la performance globale.
- Débrancher la prise téléphonique murale de la base du téléphone et branchez un téléphone à fil. Si les appels ne sont toujours pas clairs, le problème est probablement dans le câblage ou le service téléphonique.
- Contactez votre fournisseur de services téléphoniques (des frais peuvent s'appliquer).

---

<b>Traitement commun pour équipements électroniques.</b>	<p>Si le téléphone ne réagit pas normalement, placez le combiné sur la base du téléphone. Si cela ne fonctionne pas, essayez ce qui suit (dans l'ordre indiqué) :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Débranchez l'adaptateur secteur du téléphone.</li><li>• Retirez les batteries du combiné.</li><li>• Attendez quelques minutes avant de rebrancher l'alimentation à la base du téléphone.</li><li>• Réinstallez les batteries et replacez le combiné sur la base du téléphone.</li><li>• Attendez que le combiné se synchronise avec la base du téléphone. Attendez une minute pour la mise en place.</li></ul>
--	--

---

Ce téléphone n'est pas équipé d'une fonction de mise à la terre ! Par conséquent, certaines des fonctions peuvent être limitées lorsqu'il est utilisé dans les systèmes de PBX. Pour plus d'informations, contactez le support technique du fournisseur de réseau.



## 14 SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Informations de base	
Portée valide	Intérieur: 50m Extérieur: 300m
Durée de fonctionnement combiné	Temps d'attente : 100Hours env. Temps de conversation : 10 heures.
Paramètre de RF	
Fréquence	1,88GHz à 1,9GHz
Nombre de canaux	10
Bloc d'alimentation	
La base	Entrée 100-240V 50/60Hz ; sortie 6V ; adaptateur de 450mA
Chargeur	Entrée 100-240V 50/60Hz ; sortie 6V ; adaptateur de 450mA
Combiné	2.4V; Batterie rechargeable 500mAH

# 15 INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE

Prendre soin de votre téléphone.

1. Le téléphone sans fil contient des pièces électroniques sophistiquées, donc vous devez le traiter avec soin.
2. Éviter tout traitement rugueux.
3. Placez le combiné vers le bas doucement.
4. Conserver les matériaux d'emballage original afin de protéger votre téléphone si vous avez besoin pour l'expédier.

## Éviter l'eau

Vous risquez d'endommager votre téléphone s'il est mouillé. Ne pas utiliser l'appareil sous la pluie, ou le manipuler avec les mains mouillées. N'installez pas la base près d'un évier, la baignoire ou la douche du téléphone.

## Orages électriques

Des orages peuvent parfois provoquer des surtensions nuisibles aux appareils électroniques. Pour votre propre sécurité, prendre des précautions lorsque vous utilisez des appareils pendant les orages.

## Nettoyage de votre téléphone

1. Votre téléphone dispose d'un boîtier en plastique durable qui devrait se conserver pendant de nombreuses années. Nettoyer uniquement avec un chiffon doux légèrement humidifié avec de l'eau ou au savon.
2. N'utilisez pas d'eau ou de solvants de nettoyage.

## REMARQUE

N'oubliez pas que les appareils électriques peuvent causer des blessures graves si utilisé lorsque vous êtes debout dans l'eau ou mouillé. **NE PAS TIRER JUSQU'À CE QUE VOUS DÉBRANCHEZ LE CORDON D'ALIMENTATION ET TÉLÉPHONE LIGNE CORDONS MURALS.** Puis tirez l'unité par les câbles.

**MISE EN GARDE**  
**RISQUE D'EXPLOSION DES BATTERIES SI ELLES SONT REMPLACÉE PAR UN**  
**TYPE INCORRECT.**  
**JETEZ LES BATTERIES USAGÉES CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS.**


## 16 GARANTIE

Votre produit Geemarc est garanti pendant 2 ans, suivant la date d'achat. Au cours de cette période, toutes les réparations ou tous les remplacements (à notre seule discrétion) seront effectués sans frais. En cas de problème, contactez notre service d'assistance ou rendez-vous sur notre site Web : [www.geemarc.com](http://www.geemarc.com). La garantie ne couvre pas les accidents, la négligence ou les ruptures de pièces. Le produit ne doit pas être altéré ou démonté par quiconque n'étant pas un représentant agréé de Geemarc. La garantie de Geemarc ne limite en aucun cas vos droits légaux.

**IMPORTANT : VOTRE FACTURE FAIT PARTIE DE VOTRE GARANTIE ET DOIT ETRE CONSERVÉE ET PRODUITE LORS D'UNE RÉCLAMATION SOUS GARANTIE.**


**Veillez noter : la garantie est applicable en France uniquement.**

## 17 DÉCLARATION :

 Geemarc Telecom SA déclare par la présente que son produit est conforme aux exigences essentielles ainsi qu'à d'autres directives pertinentes de la norme 2014/53/UE traitant des équipements terminaux de radio et télécommunications..

La déclaration de conformité peut être consultée sur [www.geemarc.com](http://www.geemarc.com)

## DIRECTIVE DE RECYCLAGE :

 Le système DEEE (déchets des équipements électriques et électroniques) a été mis en œuvre pour les produits en fin de vie qui seront recyclés de la meilleure manière possible. Lorsque ce produit ne fonctionne plus, ne le jetez pas avec vos déchets domestiques.

Veillez utiliser une des options suivantes :

- Retirez les piles et jetez-le dans une benne DEEE appropriée. Jetez le produit dans une benne DEEE appropriée.
- Ou rapportez-le à votre détaillant. Si vous achetez un nouvel article, l'ancien devrait être accepté.

Ainsi, en respectant ces instructions, vous contribuez à la santé publique et à la protection



Pour en savoir plus :  
[www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)



de l'environnement.

N'hésitez pas à consulter notre site Internet pour obtenir des informations et de l'aide sur nos produits : [www.geemarc.com](http://www.geemarc.com)

Téléphone 0328587599

ou fax 0328587576



Pour en savoir plus :  
[www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)



UG DECT595PHOTO\_Fr\_v0.1

**geemarc™**  
Telecom SA United Kingdom  
5 Swallow Court  
Swallowfields  
Welwyn Garden City  
Hertfordshire, AL7 1SB  
For product support:  
01707 384438  
[www.geemarc.com](http://www.geemarc.com)

**geemarc™**  
Telecom SA FRANCE  
Parc de l'Etoile  
2 rue Galilée  
59791 GRANDE-SYNTHE Cedex  
Tél.service après vente :  
03 28 58 75 99  
[www.geemarc.com](http://www.geemarc.com)